

Link do produktu: <https://akmed.pl/aparat-korygujacy-koślawe-ustawienie-palucha-hallux-corectus-p-3745.html>

Aparat korygujący koślawe ustawienie palucha Hallux corectus



Numer katalogowy **050440**

Producent **Kaps**

Opis produktu

Aparat korygujący koślawe ustawienie palucha. Aparat należy stosować w czasie snu lub wypoczynku, najlepiej w pozycji leżącej.

SPOSÓB APLIKACJI:

Wsunąć aparat na pierwszy palec i zamocować stabilnie za pomocą paska z rzepem. Element konstrukcyjny powinien znajdować się pomiędzy paluchem i drugim palcem. Ortezę należy myć w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego mydła i suszyć w temperaturze pokojowej z daleka od sztucznych źródeł ciepła. Przed podjęciem decyzji o zakupie aparatu należy go przymierzyć i sprawdzić czy pasuje do stopy. Jeżeli pojawiły się jakieś niepożądane działania (np. ból) to należy zaprzestać użytkowania aparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno użytkować aparatu w czasie chodzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S