

Link do produktu: <https://akmed.pl/bandaz-stawu-barkowego-omomed-powrot-do-zdrowia-z-odpoczynkiem-p-7835.html>



## Bandaż stawu barkowego Omomed® powrót do zdrowia z odpoczynkiem

Numer katalogowy **9745**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Powrót do zdrowia z odpoczynkiem

- Duży komfort noszenia dzięki inteligentnemu rozmieszczeniu pasków
- Nadaje się do noszenia pod ubraniami
- Indywidualne dopasowanie

### Mało co ogranicza tak bardzo pacjenta, jak choroba, uraz lub operacja w okolicy barku

Omomed bandaż stawu barkowy. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne barku i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

#### Zalety produktu

- Ograniczenie ruchów i zapobieganie niepożądanym ruchom dzięki regulowanemu, znacznemu ograniczeniu rotacji zewnętrznej, odwodzenia i przodozgięcia stawu barkowego
- Elastyczny materiał wywiera łagodny, miejscowy ucisk na powierzchowne tkanki miękkie w celu ograniczenia obrzęku i przeciwdziałania mu oraz zmniejszenia napięcia mięśniowego
- Koryguje niedobory pod względem położenia w stawie, dokładnie centrując głowę kości ramiennej w panewce stawowej łopatki, oraz łagodzi ból barku

#### Sposób działania

Poprzez lekki ucisk zostają złagodzone obrzęki i obniżone napięcia mięśniowe. Przede wszystkim poprzez górny (biały) pasek ruch zostaje mocno ograniczony, tym samym są chronione zranione barki, a ból zostaje złagodzony. Barki mogą się regenerować. Zaleca się stosowanie przez kilka tygodni.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

---

Nakładkę naramienną/barkową nałożyć na właściwe ramię.

Drugie ramię przełożyć trzymając je przed sobą przez trójkąt utworzony z pasków.

Zapięty pasek przełożyć do tyłu przez głowę i ułożyć nakładkę naramienną i trójkąt utworzony z pasków we właściwej pozycji. Długi pasek piersiowy (przymocowany kółkiem do części naramiennej) przełożyć przez znajdujące się na piersi kółko trójkąta z pasków i przy pomocy zapięcia z rzepów przymocować go do części naramiennej w miejscu wskazanym przez technika ortopedycznego.

Zapiąć oba zszyte ze sobą na krzyż pasy znajdujące się pod pachą po stronie niedotkniętej urazem przekładając dłuższy dookoła pleców i przymocowując doń z przodu pasek krótszy. Taśma z rzepem powinna znajdować się od strony ciała.

Na koniec część naramienną/barkową oraz wszystkie paski należy ponownie ułożyć tak, aby znajdowały się we właściwej pozycji i nie uwierały oraz aby ograniczały dostatecznie ruch stawu barkowego).

## Wskazówki dotyczące noszenia

Jak często i kiedy należy nosić ortezę?

Przy dłuższych okresach odpoczynku (np. podczas snu) należy ściągnąć ortezę.

**Skład produktu:** Poliamide, Elastan, Poliester

## Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C,

używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

## Wskazania

- Leczenie zachowawcze i pooperacyjne po proksymalnych złamaniach głowy kości ramiennej, łopatki i panewki kości łopatki oraz po zwichnięciach stawu barkowo-obończykowego
- Leczenie zachowawcze przy przednim zwichnięciu i przewlekłym podwichnięciu barku oraz w przypadku bolesnych zmian zwyrodnieniowych stawu barkowego
- Leczenie pooperacyjne po wykonaniu stabilizacji barku, rekonstrukcji przestrzeni między rotatorami, ponownym umocowaniu przyczepu ścięgna mięśnia dwugłowego (uszkodzenie typu SLAP)

## Przeciwwskazania

- Leczenie zachowawcze i pooperacyjne zwichnięć tylnej części barku

### Rozmiar

obwód w górnej części (cm)	aż do 26	26 - 29	29 - 33	33 - 36	36 - 39
rozmiar	0	I	II	III	IV
numer artykułu	K.30○.200	K.30○.201	K.30○.202	K.30○.203	K.30○.204

○ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa, 3 = strona prawa

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 0 , I , II , III , IV

**Kolor:** srebrny

**TYP:** lewy , prawy