

Link do produktu: <https://akmed.pl/bursztynowy-pas-brzuszy-przeciwrumatyczny-z-zapieniem-pt0509-p-2598.html>



## Bursztynowy pas brzuszny - przeciwrumatyczny z zapięciem PT0509

Numer katalogowy	<b>PT0509</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- schorzenia reumatyczne
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- schorzenia wywołane osteoporozą np. złamania
- wzmożone napięcie mięśni przykręgowych
- ból wysiłkowy wyrostków kolczastych
- dolegliwości bólowe kręgosłupa w okolicy lędźwiowo - krzyżowej
- bolesność ruchowa i ograniczenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	> 140

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo - krzyżowy, tak aby zapięcie na rzep przypadało z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia na rzep.

**Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.**

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C w delikatnych środkach piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie prasować, nie chlorować, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL