

Link do produktu: <https://akmed.pl/dmuchana-i-lekka-szyna-odwodzaca-medi-sak-p-7846.html>



Dmuchana i lekka szyna odwodząca medi SAK®

Numer katalogowy **9756**

Producent **Medi**

Opis produktu

Dmuchana i lekka

- Ćwiczenie przedramienia przez podpórkę dłoni
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Bezpieczne pozycjonowanie dzięki klinowi górnej części ramienia

Zmienne (10°-60°) wsparcie odwiedzenia

medi SAK jest poduszką odwodzącą bark. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne barku i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Tymczasowe odciążenie przestrzeni podbarkowej
- Mobilizacja w celu zapobiegania zrostom w przestrzeni podbarkowej, podkruczej i podnaramiennej
- Unieruchomienie stawu barkowego w odwiedzeniu 10°-60°

Instrukcja dotycząca zakładania

Poduszka SAK dostępna jest w uniwersalnym rozmiarze i nadaje się do stosowania zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Najpierw należy włożyć nadmuchiwaną poduszkę wewnętrzną do pokrowca. Następnie nadmuchać poduszkę. Potem zapiąć okrągłą pokrywę znajdującą się nad wentylem.

Pas barkowy należy założyć na zdrowy bark. Ważne: W celu łatwiejszego zamocowania pasa zapięcia rzepowe powinny leżeć na zewnętrznej stronie pasa. Trójkąt, do którego przyszyte są pasy, powinien spoczywać na plecach.

Napełnioną powietrzem poduszkę należy podłożyć pod ramię, które doznało urazu, i przymocować pas barkowy zapięciem samozatraskowym do poduszki.

Aby ramię mogło spoczywać na poduszce w odpowiednim ułożeniu, pozycja dłoni jest odpowiednio ustawiana przy pomocy zapięć rzepowych. Dłoń obejmuje przy tym piłkę.

Obie dwie wyściółki dla przedramienia należy umocować wg. rysunku, przy czym szyna na spodniej stronie wyściółki dla przedramienia prowadzona jest przez nakładkę z taśmy rzepowej.

Poduszkę dla ramienia należy ułożyć w taki sposób, aby ramię mogło wygodnie na niej spocząć. U mniejszych pacjentów może być konieczne wyjęcie poduszki z pokrowca i odpowiednie jej pomniejszenie (np.: ostrym nożem).

Uwaga: Ważne jest, aby na skutek ułożenia ramienia przy wyściółce głowa kości ramiennej nie była wysunięta do góry!

Następnie należy zapiąć pasy przedramienia i pasy na szlufce przy ramieniu. Proszę nie zaciągać mocno pasów.

Dzięki zapięciom rzepowym na końcach pasów poduszkę można ustawiać pod względem wysokości. W ten sposób pożądaną pod względem medycznym pozycję można dostosować do budowy ciała.

Pokazuje poprawne ułożenie poduszki medi SAK. Ustawienie odwodzące można zredukować spuszczac powietrze. Pas miedniczy, obejmujący talię i poduszkę, służy jako dodatkowe umocowanie poduszki przy

Skład produktu: Poliamid

Instrukcja prania

Przed praniem usunąć nadmuchiwana poduszkę wewnętrzną. Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki mydła, kremu lub maści mogą spowodować podrażnienia skóry i zużycie materiału.

Do prania poszewkę poduszki, torbę i pasy najlepiej używać środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Zespół cieśni barku
- Rekonstrukcja po zerwaniu pierścienia rotatorów
- Implantacja protezy barkowej
- Frozen Shoulder (zamrożony bark)

Przeciwwskazania

- Brak

Rozmiar

rozmiar
numer artykułu

uniwersalny
5.830.401

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: szary