


Link do produktu: <https://akmed.pl/drabinka-lozkowa-sanity-p-7173.html>

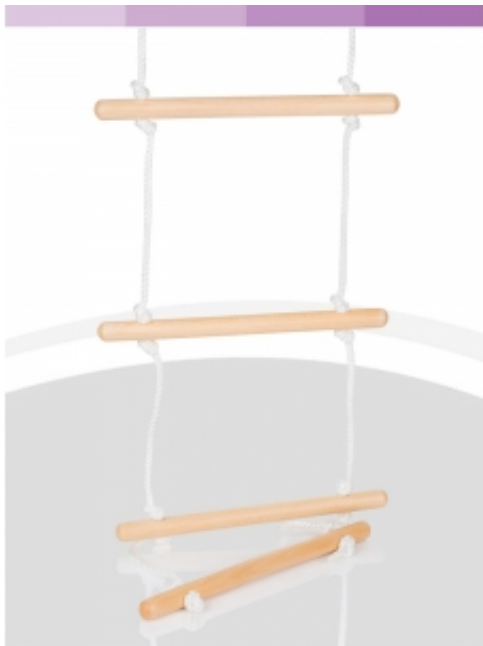

## Drabinka łózkowa SANITY

Numer katalogowy **7076**

Producent **Sanity**

### Opis produktu


Drabinka łózkowa Sanity jest propozycją dla osób sprawujących opiekę nad obłożnie chorymi.

Dzięki naszej wysokiej klasy wytrzymałej drabince pacjent będzie mógł łatwiej i bezpieczniej zmienić pozycję z leżącej na siedzącą, czy też wykonać kilka podstawowych ćwiczeń na mięśnie rąk, pleców czy ramion. Produkt można montować do każdego rodzaju łóżka.



Długość drabinki (wynosząca ok. 1,80 m) umożliwi jej przymocowanie niemal na każdym rodzaju łóżka, nie tylko na łóżku pielęgnacyjnym. Drabinkę mocujemy poprzez przywiązanie wystających odcinków linki na jej końcu do łóżka pacjenta.

Aby drabinka nie sięgała podłogi, można skrócić ją przekładając poszczególne szczeble przez siebie – np. przełożyć trzeci szczebel przez szósty.

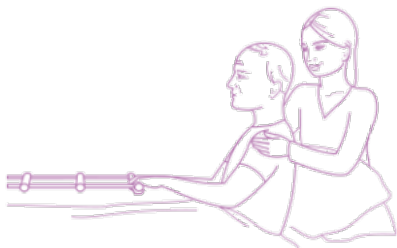

W trakcie podnoszenia się pacjenta z pozycji leżącej, osoba pielęgnująca może delikatnie wspierać jego głowę i klatkę piersiową. W ten sposób pacjent otrzymuje potrzebne mu wsparcie, przy jednoczesnym odciążeniu fizycznym opiekuna.

### Zalety produktu:

- Wspomaga codzienną pielęgnację pacjenta i jego samodzielne funkcjonowanie

- 
- Zwiększa możliwości fizyczne i odciąża kręgosłup osoby opiekującej się chorym
  - Wspiera rehabilitację i samopoczucie osób chorych, przyspiesza powrót do zdrowia i poprawia jakość życia

#### **Bezpieczeństwo:**

- Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed zastosowaniem drabinki sprawdzić poprawność mocowania.
- Dzieci oraz osoby niepełnosprawne umysłowo mogą korzystać z przyrządu wyłącznie pod ścisłą kontrolą osoby dorosłej, w pełni władz umysłowych.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo.
- Przed zastosowaniem drabinki łóżkowej u osoby porażonej połowicznie należy skonsultować się z lekarzem lub z wykwalifikowanym personelem pielęgnującym.
- W przypadku uszkodzenia zniszczyć i wyrzucić wyrób.

#### **Czyszczenie i konserwacja:**

W przypadku zabrudzenia drabinkę umyć wodą z mydłem.

Do dezynfekcji używać miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem.

Nie sterylizować w autoklawie, jak również w przy użyciu kuchenki mikrofalowej.

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obciążenie : 150 kg

Ilość szczebli: 6 szt.

Średnica szczebli: 2 cm

Szerokość szczebli: 30 cm

Długość całkowita: ok. 180 cm

Materiał: szczeble drewniane, lakierowane lina polipropylenowa.