

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-kolana-medi-elastic-knee-support-p-7818.html>



Elastyczny stabilizator kolana medi elastic knee support

Numer katalogowy **9727**

Producent **Medi**

Opis produktu

Elastyczny stabilizator kolana

- Bezszwowe szycie
- Anatomiczny kształt
- Duży komfort noszenia

Elastyczny (technologia „2-way stretch”) stabilizator kolana jest stosowany w przypadkach przewlekłych i zwyrodnieniowych chorób zapalnych

medi Kniebandage to elastyczny stabilizator kolana. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu kolanowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Zapewnia odciążenie podrażnionego stawu i poprawia przepływ krwi do tkanek miękkich otaczających staw poprzez wywieranie stałego ucisku i działanie masujące podczas ruchu pacjenta

Sposób działania

Ucisk dzianiny poprawia ukrwienie stawu i przyspiesza gojenie obrzęków i wysięków śródstawowych, a także łagodzi podrażnienia i bóle. Jednocześnie poprawia się motoryka mięśni oraz zdolność samodzielnej stabilizacji stawu kolanowego. Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień. Należy się również kierować własnym odczuciem, a także uwzględnić fakt, iż w pozycji siedzącej kolano nie może być zginane powyżej 70°. Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę. W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Instrukcja dotycząca zakładania

Przytrzymaj opaskę za górny koniec w taki sposób, aby kciuk znajdował się od wewnątrz
Naciągnij opaskę na kolano tak, aby rzepka znajdowała się pośrodku elastycznej dzianiny
Aby zdjąć opaskę należy ją przytrzymać za dolną krawędź i ściągnąć w dół
Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

Skład produktu: Poliamid, elastan

Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) związane z obrzękami i krwiakami

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy, żylaków
- Zaburzenia odpływu limfy – również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Rozmiary:

obwód "f" (cm) 37 - 40	40 - 43	43- 46	46 -49	49 - 52	52 - 55	55 - 58
obwód "d" (cm)25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46
rozmiar I	II	III	IV	V	VI	VII
numer artykułu 3.280.001 item 601	3.280.002	3.280.003	3.280.004	3.280.005	3.280.006	3.280.007
numer artykułu 3.281.001 item 602	3.281.002	3.281.003	3.281.004	3.281.005	3.281.006	3.281.007
numer artykułu 3.290.001 item 603	3.290.002	3.290.003	3.290.004	3.290.005	3.290.006	3.290.007
numer artykułu 3.290.101 item 605	3.290.102	3.290.103	3.290.104	3.290.105	3.290.106	3.290.107

II klasa kompresji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: karmelowy

Odmiany: nr 601 , nr 602 , nr 603 , nr 605