

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-kolanowego-protectgenu-p-7819.html>



## Elastyczny stabilizator stawu kolanowego protect.Genu

Numer katalogowy **9728**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Elastyczny stabilizator stawu kolanowego

- Skuteczne łagodzenie ucisku i stabilności
- Materiał przyjazny dla skóry
- Dodatkowy komfort

### Elastyczny stabilizator kolana z pierścieniem na rzepkę

protect.Genu to orteza na kolano z pierścieniem. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu kolanowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Pierścień silikonowy zapewniający skuteczne złagodzenie ucisku i stabilności
- Pręty wbudowane po każdej stronie stabilizatora zapewniają większą stabilizację
- Aktywnie oddychający, elastyczny i lekki materiał
- Dodatkowy komfort dzięki bardziej miękkiemu materiałowi w obszarze zginania
- Bezszwowe szycie i miękkie krawędzie

#### Sposób działania

Obciskająca dzianina w połączeniu z pelotą zapewnia efekt masażu, poprawia krążenie oraz przyspiesza gojenie się wysięków i obrzęków. Połączenie efektu masażu z większą stabilizacją wpływa na lepsze funkcjonowanie stawu, poprawia jego ruchomość i łagodzi ból.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Stabilizator chwycić kciukiem od środka w górnym brzegu fiszbin bocznych

---

Naciągnąć stabilizator na kolano, tak aby rzepka znalazła się centralnie w pelocie, bez powodowania ucisku  
Aby zdjąć stabilizator należy chwycić dolną część fiszbin bocznych i pociągnąć ku dołowi

**Skład produktu:** Poliamide, Elastan, Poliester

### Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.  
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Nieznaczna niestabilność
- Wysięki śródstawowe, obrzęki i stany podrażnienia (np. choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia stawów, przeciążenia, urazy, rehabilitacja pooperacyjna)

### Przeciwwskazania

- Choroby lub urazy skóry, zaburzenia czucia i dopływu krwi do nóg/stóp, zaburzenia w odpływie limfy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** II , III , IV , V , VI , VII

**Kolor:** czarny