

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-nadgarstkowego-protectmanu-active-p-7820.html>



## Elastyczny stabilizator stawu nadgarstkowego protect.Manu active

Numer katalogowy **9730**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Elastyczny stabilizator stawu nadgarstkowego

- Anatomiczny kształt
- Nieuciskająca krawędź
- Łatwe zakładanie

### Miękki stabilizator nadgarstka z szyną stabilizującą

protect.Manu active jest stabilizatorem nadgarstka. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne nadgarstka i tylko na nieuszkodzoną skórę.

#### Sposób działania

Połączenie obciskającej dzianiny, taśmy i fiszbin zapewnia stabilizację, przeciwdziałającą niekorzystnym ruchom stawu nadgarstkowego. Tym samym odciążone są mięśnie przedramienia oraz ścięgna i przyczepy ścięgien w dotkniętym chorobą obszarze, a ból zostaje złagodzony.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Przed nałożeniem stabilizatora należy odpiąć taśmę. Stabilizator przeciągnąć przez dłoń i włożyć kciuk w boczny otwór. Taśmę zawinąć wokół stawu i przymocować jej koniec

Uwaga: pierwsze nałożenie powinno odbyć się pod okiem przeszkolonego personelu fachowego.

#### Wskazówki dotyczące noszenia

Stabilizator działa najefektywniej w trakcie aktywności fizycznej.

Stabilizator można nosić z reguły przez cały dzień. Podczas dłuższych przerw w aktywności (np. sen) należy zdjąć stabilizator.

---

**Skład produktu:** Poliamide, Elastan, Poliester

### Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Nieznaczną niestabilność
- Wysięki śródstawowe, obrzęki i stany podrażnienia (np. choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia pochewki ścięgna, przeciążenia, urazy, rehabilitacja pooperacyjna)

### Przeciwwskazania

- Choroby lub urazy skóry, zaburzenia czucia i dopływu krwi do rąk, zaburzenia w odpływie limfy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TYP:** lewy , prawy

**Rozmiar:** I , II , III , IV

**Kolor:** szary