

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-skokowego-protectachi-p-7815.html>



## Elastyczny stabilizator stawu skokowego protect.Achi

Numer katalogowy **9724**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Elastyczny stabilizator stawu skokowego

- Anatomiczny kształt
- Dodatkowy komfort
- Bezszwowe szycie i miękkie krawędzie

### Elastyczny stabilizator ścięgna Achillesa z anatomicznie ukształtowanymi pelotami

protect.Achi jest opatrunkiem ścięgna Achillesa. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne ścięgna Achillesa i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

#### Zalety produktu

- Anatomicznie ukształtowane peloty zapewniające skuteczne łagodzenie ucisku i stabilności
- Aktywnie oddychający, elastyczny i lekki materiał oraz anatomicznie ukształtowane tkanie
- Dodatkowy komfort dzięki bardziej miękkiemu materiałowi w obszarze zginania
- Bezszwowe szycie i miękkie krawędzie

#### Sposób działania

Obciskająca dzianina w połączeniu z pelotą zapewnia efekt masażu, poprawia krążenie oraz przyspiesza gojenie się wysięków i obrzęków.

Połączenie efektu masażu z większą stabilizacją wpływa na lepsze funkcjonowanie stawu, poprawia jego ruchomość i łagodzi ból.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Chwycić stabilizator na wysokości peloty i przeciągnąć przez stopę, aż do prawidłowego ułożenia na pięcie. Stabilizator podciągnąć ewentualnie do góry. W razie potrzeby poprawić pozycję pelot, tak aby ścięgno znalazło się

---

odczuwalnie we wnęce peloty.

Uwaga: pierwsze nałożenie powinno odbyć się pod okiem przeszkolonego personelu fachowego.

**Skład produktu:** Poliamide, Elastan, Poliester

### Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Ostre i chroniczne zapalenia ścięgna Achillesa
- Zapalenia ścięgna Achillesa pourazowych i pooperacyjna
- Achillodynie
- Zapalenia kaletki maziowej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** II , III , IV , V , VI

**Kolor:** szary