

Link do produktu: <https://akmed.pl/elastyczny-stabilizator-stawu-skokowego-protectleva-strap-p-7814.html>



## Elastyczny stabilizator stawu skokowego protect.Leva strap

Numer katalogowy **9723**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Elastyczny stabilizator stawu skokowego

- Lepsza przyczepność
- Dodatkowy komfort
- Bezszwowe szycie i miękkie krawędzie

#### Elastyczny stabilizator stawu skokowego z elastycznym paskiem

protect.Leva strap to orteza stawu skokowego z taśmą stabilizacyjną. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu skokowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Dodatkowa przyczepność zapewniona przez szeroki pasek na stopę
- Aktywnie oddychający, elastyczny i lekki materiał
- Dodatkowy komfort dzięki bardziej miękkiemu materiałowi w obszarze zginania
- Bezszwowe szycie i miękkie krawędzie

#### Sposób działania

Obciskająca dzianina poprawia krążenie oraz przyspiesza gojenie się wysięków i obrzęków. Połączenie nacisku z pasem stabilizującym wpływa na lepsze funkcjonowanie stawu, poprawia jego ruchomość i łagodzi ból.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Chwycić stabilizator centralnie po obu stronach i przeciągnąć przez stopę, aż do prawidłowego ułożenia na pięcie i podciągnąć do góry.

Elastyczną taśmę zapiąć wokół stawu skokowego, przeciągając ją w formie „ósemki”.  
Przyczepić koniec taśmy do części elastycznej.

---

Uwaga: pierwsze nałożenie powinno odbyć się pod okiem przeszkolonego personelu fachowego.

**Skład produktu:** Poliamid, Elastan, Poliester

### **Instrukcja prania**

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### **Wskazania**

- Niestabilność więzadeł, naciągnięcie więzadła torebkowego
- Wysięki śródstawowe, obrzęki i stany podrażnienia (np. przeciążenia, urazy, rehabilitacja pooperacyjna)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI

**Kolor:** szary