

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-ledzwiowy-z-fiszbinami-pt0235-p-2597.html>



Gorset lędźwiowy z fiszbinami PT0235

Numer katalogowy	PT0235
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w zespołach bólowych kręgosłupa o różnej etiologii (dyskopatie, spondyloartrozy, nisko zlokalizowane skoliozy)
- w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa
- w stanach wywołujących wzmożone, bolesne napięcie mięśni grzbietu
- dla ochrony kręgosłupa przed kontuzjami np. podczas uprawiania sportu lub wysiłku fizycznego

Gorset nie ogranicza ruchów.

Istnieje możliwość zmiany siły nacisku poprzez regulację w obrębie zapięć na rzepy.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]	80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 140

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Gorset założyć na odcinek lędźwiowo - krzyżowy kręgosłupa. Zapiąć zapięcie z przodu na rzep, a następnie

zapiąć boczne taśmy dociskające, regulując indywidualny ucisk.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL