

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-ortopedyczny-ledzwiowo-krzyzowy-wysoki-pt0207-p-2689.html>



Gorset ortopedyczny lędźwiowo - krzyżowy wysoki PT0207

Numer katalogowy	PT0207
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- dla chorych z zespołem bólowym kręgosłupa o różnej etiologii (dyskopatie, spondyloartozę, nisko zlokalizowane skoliozy)
- w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa
- w stanach wywołujących wzmożone, bolesne napięcia mięśni grzbietu
- ochrania kręgosłup przed kontuzjami np. podczas uprawiania sportu, wysiłku fizycznego

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]	80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	> 140

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- W konstrukcji gorsetu wyróżnia się trzy rzędy zapięć. Odpiąć rzepy w środkowej (przedniej) części. Pas przyłożyć częścią, w której znajdują się fiszbiny do lędźwiowo - krzyżowego odcinka kręgosłupa, a następnie zapiąć z przodu wszystkie cztery zapięcia na rzep. W celu lepszego dopasowania gorsetu należy wyregulować ułożenie gorsetu bocznymi zapięciami.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Skóra pod pasem powinna być czysta, sucha, bez maści, kremów itp.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Można prać w pralce. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie chlorować!
- Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia gorsetu zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie gorsetu bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni kręgosłupa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL