

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-stabilizujacy-ledzwiowo-krzyzowy-262-pt0236-p-2698.html>



## Gorset stabilizujący lędźwiowo - krzyżowy „26/2” PT0236

Numer katalogowy

**PT0236**

Producent

**Pani Teresa**

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
- dyskopatia odcinka lędźwiowo-krzyżowego
- kręgozmyk niewielkiego stopnia
- zmiany zwyrodnieniowe
- doleczenie po zabiegach ortopedycznych
- złamania wyrostków kolczastych i poprzecznych
- stabilizacja odcinka lędźwiowo-krzyżowego po operacjach
- wzmocnienie mięśni, poprawa ukrwienia, utrzymanie temperatury
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa zwłaszcza w pozycji wymuszonej

### INSTRUKCJA UŻYWANIA

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha	71 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 130	131 – 140

w najszerszym  
miejscu [cm]

Produkty w rozmiarze XS oraz XXXL są dostępne na zamówienie, z wydłużonym okresem oczekiwania

#### Sposób zakładania:

- Odpiąć rzepy.
- Gorset założyć, obejmując odcinek lędźwiowo-krzyżowy tak, aby zapięcie na rzep przypadło z przodu.

- 
- Gorset zapinąć z przodu na rzepy, a następnie zapinąć taśmy dociągające, regulując indywidualnie dopasowanie.
  - Niewskazane jest regulowanie wysokości wyrobu poprzez naciąganie go w górę lub w dół po zapięciu rzepów, gdyż może to spowodować rozdarcie dzianiny. Jeśli skorygowanie wysokości jest konieczne, należy najpierw rozpiąć rzepy, a następnie ustawić wyrób w odpowiedniej pozycji i ponownie je zapinąć.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Przed praniem wyjąć stalki z gorsetu oraz zapinąć rzepy w celu uniknięcia zahaczenia wyrobu.

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

**Wyrób jest zapinany na rzepy.**

Wysokość wyrobu 26 cm.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

**Kolor:** Cielisty , szary