

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-ze-zintegrowana-orteza-plecow-spinomed-active-p-7830.html>



Gorset ze zintegrowaną ortezą pleców Spinomed® active

Numer katalogowy **9740**

Producent **Medi**

Opis produktu

Gorset ze zintegrowaną ortezą pleców

- Naukowo dowiedziona skuteczność
- Prawie niewidoczna pod ubraniem
- Różnorodność wariantów

Orteza pleców Spinomed active jest stosowana w jawnej osteoporozie – tzn. do długotrwałego leczenia. Składa się z gorsetu i szyny na plecach.

Paski są zintegrowane w elemencie tekstylnym, który odgrywa pomocniczą rolę w utrzymywaniu prawidłowej postawy. Szynę pleców można dopasować do krzywizny kręgosłupa i jest ona ukryta w kieszeni w gorsecie. Szyna nie może wysunąć się i ponadto stymuluje wzmocnienie mięśni. Daje to stały efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego.

Zalety produktu

- Zintegrowane, elastyczne pasy miednicze i barkowe wyzwalają biofeedback
- Zwiększenie ruchomości poprzez wzmocnienie siły mięśniowej
- Zmniejszenie kifozy spowodowanej osteoporozą
- Zmniejszenie bólu

Sposób działania

Wzmocnienie mięśni tułowia prowadzi do wyprostowania górnej części ciała.

Wyprostowanie tułowia zwiększa pojemność płuc, tak że często obserwowana u pacjentów z osteoporozą zadyszka jest w znacznym stopniu zmniejszona.

Wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych zwiększa wydolność fizyczną pacjenta.

Typowa dla pacjentów z osteoporozą tendencja do zataczania się ulega zmniejszeniu, co prowadzi do zmniejszenia tendencji do upadków i tym samym zmniejsza ryzyko przyszłych złamań.

Instrukcja dotycząca zakładania

Technik ortopedyczny wstępnie uformował szynę. Wsunąć szynę w kieszeń na plecach. Żeberka muszą być skierowane na zewnątrz. Węższy koniec jest wtedy na górze. Jeśli jest to łatwiejsze dla użytkownika, szynę można wsunąć na końcu. Otworzyć suwak z haczykami z przodu. Założyć korpus. Najpierw zapiąć haczyki, a później suwak. W razie konieczności długość korpusu można regulować za pomocą haczyków na nośniku i zapięcia na wstawce. Od czasu do czasu może być konieczne sprawdzenie korpusu i szyny. Powinien wykonać to technik ortopedyczny.

Skład produktu: Aluminium, Poliamid, Elastan, Bawełna

Instrukcja prania

Przed praniem należy usunąć stabilizator pleców. Przed praniem należy zamknąć wszystkie zapięcia (rzepy, suwak, haczyki i pętelki). Pozostałości mydła, płynów kosmetycznych i maści mogą powodować podrażnienie skóry i zużycie materiału. Produkt należy prać ręcznie, najlepiej detergentem medi clean lub w palce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie prać chemicznie.

W celu uniknięcia przebarwień korpus należy zawsze prać z podobnymi kolorami.

Wskazania

- Osteoporotyczne złamania kręgow w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
- Młodzieńcza choroba Scheuermanna
- Hiperkifoza z przewlekłym bólem pleców

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane

Rozmiar

Należy skorzystać z naszego arkusza pomiarowego, nr art. 99879, w celu umożliwienia nam ustalenia prawidłowego rozmiaru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , szampanowy