

Link do produktu: <https://akmed.pl/gorset-ze-zintegrowana-orteza-plecow-spinomed-active-men-p-7831.html>



Gorset ze zintegrowaną ortezą pleców Spinomed® active men

Numer katalogowy **9741**

Producent **Medi**

Opis produktu

UWAGA! Produkt szyty wyłącznie na miarę

Gorset ze zintegrowaną ortezą pleców

- Naukowo dowiedziona skuteczność
- Prawie niewidoczna pod ubraniem
- Indywidualne dopasowanie do specjalnych potrzeb

Pierwszy na rynku gorset dla mężczyzn ze zintegrowaną ortezą pleców do leczenia osteoporozy

Spinomed active men to orteza kręgosłupa. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu zmian osteoporozytycznych. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Zintegrowane, elastyczne pasy miedniczne i barkowe wywołują biofeedback
- Zwiększenie ruchomości poprzez wzmocnienie siły mięśniowej
- Zmniejszenie kifozy spowodowanej osteoporozą
- Zmniejszenie bólu

Sposób działania

Zastosowany tutaj elastyczny materiał wraz z szyną grzbietową rozciągają w sposób odczuwalny okolice miednicy i barków. Jakby w odruchu na to rozciąganie napinają Państwo mięśnie w okolicach tułowia i dochodzi do wyprostowania się górnej części ciała.

Proces ten nazywamy „biosprężeniem zwrotnym” i prowadzi on w miarę stosowania ortezy Spinomed active men do redukcji kifozy, typowej dla osteoporozy. Aktywacja mięśni tułowia wywołuje efekt treningu. Silniejsze mięśnie sprawiają, że bóle ustępują, a Państwo stajecie się bardziej mobilni na codzień.

Instrukcja dotycząca zakładania

Otworzyć zamek błyskawiczny i odpiąć haczyki w body.

Nałożyć body, zapiąć haczyki a następnie zamek błyskawiczny.

Długość body można dostosować poprzez odpowiednie ustawienie znajdujących się na barkach regulatorów.

Następnie wsunąć dopasowaną przez technika ortopedycznego szynę do odpowiednich kieszeni na plecach.

Żeberka muszą wskazywać na zewnątrz. Węszy koniec musi być położony u góry.

Skład produktu: Elastan, Poliester, Bawełna, Poliamide, Aluminium

Instrukcja prania

Ortezę kręgosłupa należy wyjąć przed praniem. Przed praniem należy zamknąć wszystkie zapięcia (rzepy, zamek błyskawiczny, haczyki i pętelki). Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Aby uniknąć przebarwień, body należy prać zawsze razem z podobnymi kolorami.

Wskazania

- Osteoporotyczne złamania kręgow w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
- Młodzieńcza choroba Scheuermanna
- Hiperkifoza z przewlekłym bólem pleców

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane

Rozmiar

Należy skorzystać z naszego arkusza pomiarowego, nr art. 99879, w celu umożliwienia nam ustalenia prawidłowego rozmiaru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: szary