

Link do produktu: <https://akmed.pl/gruszka-do-zaparc-nr-9-sanity-p-7163.html>



## Gruszka do zaparc (Nr 9) SANITY

Numer katalogowy	<b>7058</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Gruszka do zaparc którą mamy Państwu przyjemność zaprezentować przeznaczona jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej u osób dorosłych oraz dzieci od 3 roku życia.

Wysokiej klasy grusza zawiera anatomiczną dopasowaną końcówkę, oraz dostępna jest w wygodnej pojemności 224 ml. Przyrząd wykonany jest z bezpiecznego, atestowanego tworzywa.

#### Zalety produktu:

- Usuwa toksyny z organizmu
- Oczyszcza układ pokarmowy
- Przynosi ulgę w zaparciach
- Wspomaga w odchudzaniu
- Pobudza perystaltykę i mikroflorę jelitową

#### Wskazania:

Produkt wspomaga działanie układu pokarmowego: zaparcia, skurcze jelit, przewlekłe bóle brzucha, trudności z wypróżnianiem, zapalenia jelita grubego. Lewatywy stosowane są również w zmniejszaniu dolegliwości układu oddechowego: naloty na języku, nieprzyjemny oddech, zapalenie jamy ustnej, jak również wspomagają układ nerwowy człowieka: przewlekłe bóle głowy, zmęczenie i rozdrażnienie.

#### Instrukcja użycia:

Przed wykonaniem zabiegu zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wymyj każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurz na kilka minut w gotującej się wodzie. Zwróć uwagę na to, aby elementy były zanurzone w całości.

Po ostudzeniu, napełnij gruszkę płynem do przepłukiwania ciała, o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Kankę nasmaruj cienko wazeliną lub olejem jadalnym i wprowadź delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ściśnij gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zaciśnij mocno pośladki, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.

Stosuj zgodnie z przeznaczeniem. Produktu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej. Nie należy stosować środków dezynfekujących. W razie uszkodzenia jednej z części wyrzuc cały zestaw. Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

