

Link do produktu: <https://akmed.pl/gruszka-katar-stop-0-6-miesiacy-nr-2-sanity-p-7171.html>



## Gruszka katar stop 0-6 miesięcy (NR 2) SANITY

Numer katalogowy	<b>7069</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Gruszka Katar Stop 0-6 M to profesjonalny przyrząd do udrażniania dróg oddechowych u najmłodszych dzieci które nie przekroczyły jeszcze szóstego miesiąca życia.

Innowacyjna zaokrąglona końcówka, oraz brak szkodliwych ftalanów w składzie zapewni największy poziom bezpieczeństwa. Regularne korzystanie z wysokiej klasy Gruszki zapewni dziecku spokojny sen i mniejsze ryzyko infekcji dróg oddechowych.

#### Zastosowanie:

Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji i udrażniania dróg oddechowych dzieci i niemowląt. Systematyczne stosowanie zmniejsza ryzyko infekcji ucha środkowego i zatok, ułatwia oddychanie i zasypianie dziecka.

Dla starszych dzieci zalecamy Gruszkę Katar Stop 6-12 miesięcy oraz Gruszkę Katar Stop powyżej 1 roku.

- Na sucho - zasysanie Udrażnianie nosa z wydzieliny kataralnej oraz oczyszczanie uszu z wody i woskowiny
- Na mokro - irygacja oczyszczanie wodą nosa, podrażnionej skóry lub części intymnych

#### Instrukcja użycia:

Ściśnij gruszkę i przyłóż końcówkę do nosa lub ucha dziecka, a następnie delikatnie zasysaj wydzielinę. Przed każdym użyciem wymyj gruszkę bieżącą wodą, a następnie włóż do gotującej się wody na kilka minut.

- Produkt nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie należy stosować środków dezynfekujących.
- W razie ewentualnego uszkodzenia wyrzucić gruszkę do kosza.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.