

Link do produktu: <https://akmed.pl/gruszka-katar-stop-6-12-m-nr-7-sanity-p-7169.html>



## Gruszka katar stop 6-12 M (Nr 7) SANITY

Numer katalogowy **7067**

Producent **Sanity**

### Opis produktu

Gruszka Katar Stop 6-12 M znajduje zastosowanie u dzieci w wieku od pół roku do rocznych.

Wysokiej jakości Gruszka udroźni zatkane drogi oddechowe szybko, bezpiecznie i skutecznie. Dzięki wykorzystaniu Gruszki zapewnimy naszemu dziecku spokojny sen, oraz wyeliminujemy ryzyko poważniejszych infekcji dróg oddechowych.

#### Zastosowanie:

Gruszka przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji i udrażniania dróg oddechowych dzieci i niemowląt. Systematyczne stosowanie zmniejsza ryzyko infekcji ucha środkowego i zatok, ułatwia oddychanie i zasypianie dziecka.

Dla starszych dzieci zalecamy Gruszkę Katar Stop powyżej 1 roku, a dla młodszych Gruszkę Katar Stop 0-6 miesięcy.

- Na sucho – zasysanie Udrażnianie nosa z wydzieliny kataralnej oraz oczyszczanie uszu z wody i woskowiny
- Na mokro – irygacja oczyszczanie wodą nosa, podrażnionej skóry lub części intymnych

#### Instrukcja użycia:

Ściśnij gruszkę i przyłóż końcówkę do nosa lub ucha dziecka, a następnie delikatnie zasysaj wydzielinę. Przed każdym użyciem wymyj gruszkę bieżącą wodą, a następnie włóż do gotującej się wody na kilka minut.

- Produkt nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie należy stosować środków dezynfekujących.
- W razie ewentualnego uszkodzenia wyrzucić gruszkę do kosza.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.