


Link do produktu: <https://akmed.pl/gruszka-xl-do-zaparc-nr-11-sanity-p-7162.html>

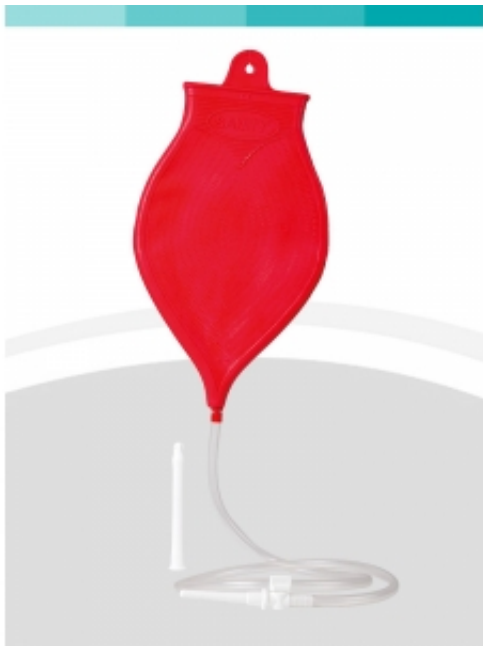

Gruszka XL do zaparc (Nr 11) SANITY

Numer katalogowy	7054
Producent	Sanity

Opis produktu

Gruszka XL do zaparc przeznaczona jest dla osób dorosłych, oraz dla dzieci powyżej 3 roku życia. Jest to rozwiązanie atestowane klinicznie, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wysokiej jakości Gruszka XL dostępna jest w podwyższonej pojemności gwarantującej jeszcze lepsze oczyszczanie.

Zalety produktu:

- Usuwa toksyny z organizmu
- Oczyszcza układ pokarmowy
- Przynosi ulgę w zaparciach
- Wspomaga w odchudzaniu
- Pobudza perystaltykę i mikroflorę jelitową

Wskazania:

Produkt wspomaga działanie układu pokarmowego: zaparcia, skurcze jelit, przewlekłe bóle brzucha, trudności z wypróżnianiem, zapalenia jelita grubego. Lewatywy stosowane są również w zmniejszaniu dolegliwości układu oddechowego: naloty na języku, nieprzyjemny oddech, zapalenie jamy ustnej, jak również wspomagają układ nerwowy człowieka: przewlekłe bóle głowy, zmęczenie i rozdrażnienie.

Instrukcja użycia:

Przed wykonaniem zabiegu zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wymyj każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurz na kilka minut w gotującej się wodzie. Zwróć uwagę na to, aby elementy były zanurzone w całości.

Po ostudzeniu, napełnij gruszkę płynem do przepłukiwania ciała, o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Kankę nasmaruj cienko wazeliną lub olejem jadalnym i wprowadź delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ściśnij gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zaciśnij mocno pośladki, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.

Stosuj zgodnie z przeznaczeniem. Produktu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej. Nie należy stosować środków dezynfekujących. W razie uszkodzenia jednej z części wyrzuc cały zestaw. Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

