

Link do produktu: <https://akmed.pl/hiperprzeprostna-ortezy-medi-4c-flex-p-7833.html>



## Hiperprzeprostna ortezy medi 4C flex

Numer katalogowy **9743**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Hiperprzeprostna ortezy

- Dostępna w 4 rozmiarach
- Łatwe użycie
- Stabilna konstrukcja ramy

### Orteza przeprostowa z zapięciem na guzik lub haczyk

medi 4C flex jest ortezą hiperprzeprostną. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne kręgosłupa na odcinku lędźwiowym/piersiowym oraz jedynie na nieuszkodzoną skórę.

#### Zalety produktu

- Ruchoma listwa biodrowa zapewniająca większą wygodę podczas siedzenia
- Dostępna w 4 rozmiarach z opcjonalną regulacją długości listwy bocznej
- Łatwe użycie dzięki nowo opracowanemu zapięciu na guzik
- Regulowana szerokość listew piersiowych
- Dostępna również jako wersja krótka i bardzo krótka
- Dostępna z zapięciem na guzik lub haczyk

#### Sposób działania

Przeprost kręgosłupa zapewnia stabilizację w płaszczyźnie strzałkowej  
Stabilność rotacyjna jest ograniczona przez podobojczykowe peloty wyprostowujące  
Stabilna konstrukcja ramy ogranicza zgięcie boczne

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Ustawienie szerokości Proszę najpierw poluzować obydwie śruby podstawy i ustawić ortezę stosownie do szerokości ciała

pacjenta. Należy przy tym zawsze sprawdzić, czy działanie ruchomego pałąka nie jest ograniczone. Proszę następnie poluzować obydwie boczne śruby znajdujące się przy podstawie oraz śruby umiejscowione przy zamknięciu i ustawić ortezę odpowiednio do długości ciała pacjenta – odległość między spojeniem łonowym a powierzchnią ortozy przylegającą w okolicy podobojczykowej. Potem proszę dokręcić mocno wszystkie śruby.

Ustawienie długości paska Proszę ustawić długość paska powyżej zapięć rzepowych i szlufki w ten sposób, aby pelota znalazła się po środku szerokości pleców. Należy przy tym pamiętać, że kilka centymetrów paska zostanie wciągnięte przez mechanizm zapięcia.

Otwieranie i zamykanie zapięcia Zapięcie można otworzyć przesuwając szarą listwę. W celu zamknięcia zapięcia należy nałożyć pokrywę, aż się zatrzaśnie w słyszalny sposób.

**Skład produktu:** Aluminiowa, PVC

## Instrukcja prania

Ortezę wycierać wilgotną szmatką.

Pelotę grzbietową można delikatnie czyścić za pomocą szczoteczki ręcznej.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

## Wskazania

- Stabilne złamania kompresyjne odcinka piersiowego oraz lędźwiowego kręgosłupa
- Osiowa stabilizacja przy uwarunkowanych osteoporotycznych złamaniach odcinka piersiowolędźwiowego kręgosłupa
- W celu czasowego unieruchomienia po operacjach krążka międzykręgowego
- Zewnętrzna stabilizacja przy hiperkifozach występujących przy młodzieńczej chorobie Scheurmanna
- Do tymczasowego zaopatrzenia ortezą po leczeniu operacyjnym niestabilnych złamań kręgow
- Jako trwałe zaopatrzenie ortopedyczne przy nieoperacyjnych guzach i przerzutach do kręgosłupa
- Pooperacyjne zaopatrzenie ortezami po leczeniu operacyjnym guzów i przerzutów do kręgosłupa
- Po zabiegach odciążających struktury nerwowe kręgosłupa z lub bez wewnętrznej stabilizacji

## Przeciwwskazania

- Ortezy hiperekstensyjnej medi 4C flex nie należy stosować przy niestabilnych, wymagających operacji złamaniach kręgow na odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa z i bez deficytów neurologicznych. Względny przeciwwskazaniem mogą być występujące w okolicach peloty uszkodzenia skóry, w tym wypadku należy się wcześniej porozumieć z lekarzem prowadzącym leczenie. Jeśli ze strony dermatologa nie ma żadnych przeciwwskazań odnośnie stosowania ortozy, można używać jej w wyżej opisanym przypadku.

## Rozmiar

rozmiar	S	M	L	XL
obwód bioder cm	60 - 75	76 - 90	91 - 105	106 - 115
normalny tors	39 - 47	42 - 50	45 - 53	48 - 56
krótki tors	36 - 44	39 - 47	42 - 50	45 - 53
bardzo krótki tors	32 - 40	35 - 43	38 - 46	41 - 49

w wersji z zapięciem

rozmiar	S	M	L	XL
numer artykułu	5.5G1.□02	5.5G1.□03	5.5G1.□04	5.5G1.□05

□ = długość torsu: 0 = normalny tors , 1 = krótki tors

w wersji z haczykiem zamykającym

rozmiar	S	M	L	XL
numer artykułu	5.5G1.3□2	5.5G1.3□3	5.5G1.3□4	5.5G1.3□5

□ = długość torsu: 0 = normalny tors , 1 = krótki tors , 2 = bardzo krótki tors

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**Wariant:** z haczykiem , z zapięciem