

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-szyjny-ortopedyczny-typu-florida-z-usztywnieniem-pt0209b-p-2633.html>



Kołnierz szyjny ortopedyczny typu FLORIDA - z usztywnieniem PT0209B

Numer katalogowy

PT0209B

Producent

Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w zmianach zniekształcających odcinek szyjny kręgosłupa
- w leczeniu schorzeń mięśni szyi, odciąża kręgosłup szyjny
- pozwala na stopniową korekcję oraz ustawienie głowy w różnych pozycjach
- częściowo unieruchamia i koryguje kręgosłup szyjny, podpira i stabilizuje
- w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa
- w leczeniu uzupełniającym w urazach żuchwy
- w stanach pourazowych
- w dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa

Tabela rozmiarów

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu szyi oraz ustalić wysokość kołnierza, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Kołnierz ułożyć częścią wklęsłą pod żuchwę i zapiąć na rzep z tyłu szyi.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie

dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

Wysokość: 10 cm , 12 cm , 8 cm