

Link do produktu: <https://akmed.pl/kompres-flex-medium-2122-cm-sanity-p-7151.html>




## Kompres FLEX MEDIUM 21x22 CM SANITY

Numer katalogowy	<b>6989</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu


Kompres Flex Medium jest okładem o średnim rozmiarze, kształtem zbliżonym do idealnego kwadratu. Zastosowanie żelu jest wszechstronne, może być używany na ciepło lub zimno w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać.

Skuteczne ciepłe kompresy polecane są przy przewlekłym bólu, natomiast zimne okłady znajdą zastosowanie w przypadku nagłych stanów zapalnych.

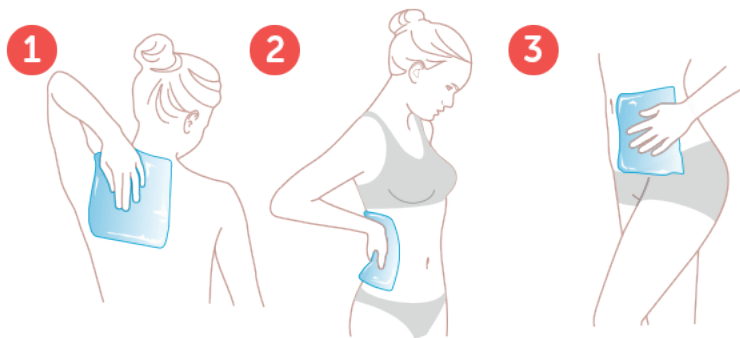

### ZIMNE OKŁADY

Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy. Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia. Przyśpiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń. Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi poparzenia. Pomaga zatamować krwotok z nosa.

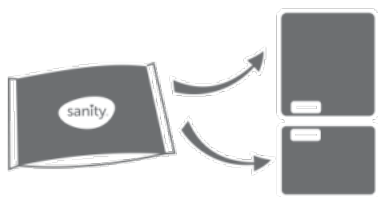


>2 h (-18°C)

Umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny

### CIEPŁE OKŁADY

Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu.

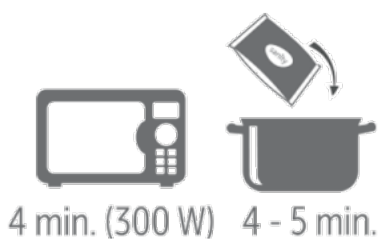

4 min. (300 W) 4 - 5 min.

W kuchence mikrofalowej podgrzewaj ok. 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na ok. 5 minut.



Osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie zastosuj na ciało.

Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany. Przeciwwskazania do stosowania znajdują się w załączonej wewnątrz opakowania broszurze informacyjnej.