

Link do produktu: <https://akmed.pl/kompres-flex-standard-1026-cm-sanity-p-7152.html>



## Kompres FLEX STANDARD 10×26 CM SANITY

Numer katalogowy	<b>6990</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu


Kompres Flex Standard posiada format klasycznego prostokąta. Żelowy okład to praktyczna skuteczna i wygodna alternatywa dla tradycyjnych kompresów zazwyczaj wykonywanych z wykorzystaniem zimnej bądź ciepłej wody.

Wysokiej jakości kompres gwarantuje trwałą eksploatację, oraz szybkie i bezpieczne przygotowanie (na ciepło w mikrofalówce, na zimno w zamrażarce lub lodówce).



### ZIMNE OKŁADY

Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy. Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia. Przyspiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń. Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi poparzenia. Pomaga zatamować krwotok z nosa.

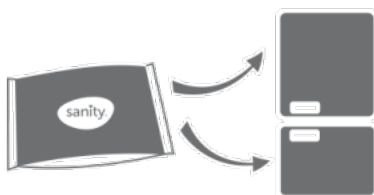


>2 h (-18°C)

Umieść kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny

---

## CIEPŁE OKŁADY

Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu.

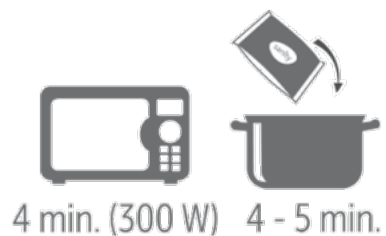

W kuchence mikrofalowej podgrzewaj ok. 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na ok. 5 minut.



Osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie zastosuj na ciało.

Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany. Przeciwwskazania do stosowania znajdują się w załączonej wewnątrz opakowania broszurze informacyjnej.