

Link do produktu: <https://akmed.pl/korekcja-kregoslupa-w-osteoporozie-spinomed-p-7829.html>



## Korekcja kręgosłupa w osteoporozie Spinomed®

Numer katalogowy **9739**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Korekcja kręgosłupa w osteoporozie

- Naukowo dowiedziona skuteczność
- Paski barkowe o ergonomicznym kształcie
- Poprawa siły mięśni tułowia

Orteza pleców Spinomed jest stosowana w leczeniu złamań trzonów kręgów spowodowanych osteoporozą. Składa się z peloty znajdującej się na plecach i systemu pasków z zapięciami na rzep.

Oba elementy można indywidualnie dostosowywać do krzywizny pleców i wymiarów ciała pacjenta. System pasków zamykany jest z przodu, dzięki czemu zakładanie ortezy jest tak łatwe jak zakładanie lekkiego plecaka.

#### Zalety produktu

- System pasów i stabilizator pleców powodują aktywację poprzez wyzwolenie biofeedbacku
- Zwiększenie ruchomości poprzez wzmocnienie siły mięśniowej
- Zmniejszenie kifozy spowodowanej osteoporozą
- Zmniejszenie bólu

#### Sposób działania

Noszenie ortezy Spinomed aktywuje mięśnie pleców. Dzięki temu górna część ciała łagodnie się wyprostowuje, co przeciwdziała typowemu dla osteoporozы zaokrągleniu się pleców.

Spinomed stymuluje zasoby mięśniowe znajdujące się w organizmie. Szyna plecowa dopasowywana jest indywidualnie przez technika ortopedycznego. Razem z pasami orteza wspiera mięśnie przy odchylaniu barków do tyłu i wyprostowywaniu górnej części ciała. Mogą Państwo przy tym swobodnie poruszać barkami i ramionami, a także oddychać bez przeszkód. Jeżeli orteza jest optymalnie dopasowana, może ona łagodzić ból i podnieść zdolność poruszania się w życiu codziennym.

---

## Instrukcja dotycząca zakładania

Zakładanie ortozy Spinomed nosić na ubraniu. Aby ułatwić Panu/Pani zakładanie ortozy zalecane jest ustawienie się przed lustrem.

Zakładanie Spinomed następuje według zasady plecaka:

Otworzyć duże zapięcie rzepowe znajdujące się z przodu.

Założyć ortezę w taki sposób, w jaki zakłada się plecak. Szyna grzbietowa musi przylegać do pleców jaśniejszą stroną.

Włożyć prawą rękę do pętli prawej strony zapięcia. Przytrzymać lewą stronę zapięcia drugą ręką i zapiąć klamrę brzuszna.

Orteza leży prawidłowo, jeśli krawędź zapięcia znajduje się bezpośrednio nad pachwiną.

Stojąc przed lustrem sprawdzić:

Położenie szyny grzbietowej, która powinna przylegać dokładnie do kręgosłupa. Dolna krawędź szyny powinna znajdować się na wysokości pośladków.

Ustawienie pasów: pasy nie mogą być przekręcone.

Położenie wyściółki w okolicy barku pasy nie mogą wżynać się w pachy

Sprzączki kierujące: nie mogą uwierać po bokach.

## Wskazówki dotyczące noszenia

W fazie przyzwyczajania się i w celu przywrócenia czynności mięśni należy ortezę stopniowo wprowadzać do użytku. Oznacza to, że należy ją zakładać codziennie na coraz dłuższy czas i w ten sposób ostrożnie trenować mięśnie. W zależności od kondycji organizmu na początek może wystarczyć nieprzerwane noszenie ortozy przez 30 minut, potem ten czas należy stopniowo wydłużać.

**Skład produktu:** Aluminium, Poliester, Elastan, Elastomer

## Instrukcja prania

Ortezę kręgosłupa należy wyjąć przed praniem. Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

## Wskazania

- Osteoporotyczne złamania kręgow na odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
- Hiperkifoza przy młodzieńczej chorobie Scheurmanna
- Zaokrąglone plecy z chronicznym bólem pleców

## Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane

## Rozmiar

długość pleców (cm) aż do 43	44 - 49	50 - 55	56 - 61	62 - 67
rozmiar XS	S	M	L	XL
numer artykułu 5.669.051	5.669.052	5.669.053	5.669.054	5.669.055

Rozmiary XS i S posiadają małe zamknięcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS  
**Kolor:** szary