

Link do produktu: <https://akmed.pl/krotka-funkcjonalna-miekkie-orteza-z-materialu-medi-airtex-stabimed-pro-p-7868.html>



Krótką, funkcjonalną miękką orteza z materiału medi airtex Stabimed® pro

Numer katalogowy	9778
Producent	Medi

Opis produktu

Z ochroną przed przeprostem

- Duży komfort dzięki trwałemu materiałowi siateczkowemu z tyłu
- Działanie proprioceptywne dzięki precyzyjnej kompresji
- Duży komfort dzięki medi Airtex+

Krótką, funkcjonalną miękką orteza, wykonana z materiału medi Airtex

Stabimed pro jest miękką ortezą stawu kolanowego. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Oboczna stabilizacja stawu kolanowego
- Zapobieganie przeprostowi
- Poprawa propriocepcji w celu zwiększenia samodzielnego prowadzenia i stabilizacji stawu kolanowego

Sposób działania

- kolateralna stabilizacja stawu kolanowego
- ochrona przed hiperekstensją
- miękką orteza z efektem kompresyjnym i proprioceptycznym

Instrukcja dotycząca zakładania

Rozpiąć wszystkie paski i wyciągnąć nieznacznie do tyłu, tak aby nie utrudniały zakładania ortezy.
Ugiąć nogę do pozycji pod kątem ok. 45°. Naciągnąć ortezę na nogę.
Zwrócić uwagę, aby rzepka kolana znajdowała się centrycznie w otworze rzepkowym ortezy. Środki zginaczy ortezy powinny znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolana.
Zapiąć obydwa paski, najpierw dolny, a następnie górny. Jeżeli to możliwe, przebiec parę metrów i ponownie sprawdzić prawidłowe osadzenie ortezy.
W razie potrzeby skorygować osadzenie ortezy na nodze.
Aby zdjąć ortezę, należy chwycić ją z boku dolnej części i pociągnąć w dół.

Skład produktu: Avional, Poliamid, Elastan, PU

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Niestabilności lekkie do średnich stawu kolanowego
- Chroniczne niestabilności
- Uszkodzenie łąkotki

Przeciwwskazania

- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach (np. w przypadku cukrzycy)
- Zaburzenia odpływu chłonki oraz nierozpoznane obrzęki tkanek miękkich, z dala od obszaru zastosowania

Rozmiar

obwód uda (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74	74 – 84
rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
numer artykułu	G.080.061	G.080.062	G.080.063	G.080.064	G.080.065	G.080.066	G.080.067

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: szary