

Link do produktu: <https://akmed.pl/krotka-funkcjonalna-miekkka-orteza-z-ograniczeniem-zakresu-ruchomosci-z-materialu-medi-airtex-stabimed-p-7869.html>



krótka, funkcjonalna miękkka orteza z ograniczeniem zakresu ruchomości z materiału medi airtex Stabimed®

Numer katalogowy **9779**

Producent **Medi**

Opis produktu

Z ograniczeniem prostowania/zginania

- Stabilizacja dzięki opatentowanemu systemowi zawiasów
- Paski okrężne na udzie i podudziu
- System antypoślizgowy

Krótką, funkcjonalną orteza miękką z ograniczeniem zginania/prostowania

Stabimed jest miękką ortezą stawu kolanowego z ogranicznikiem prostowania i zginania. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzonej skórze.

Zalety produktu

- bardzo wygodne noszenie dzięki nieskrępowanemu dołowi podkolanowemu.
- physioglide TF: Nowa konstrukcja zawiasu pozwala na beznarzędziową wymianę klinów.
- opatentowany zawias physioglide optymalnie imitujący ruch tocznoślizgowy w strefie kolanowej. Dzięki temu dobrze przylega do nogi.
- Zapobieganie przeprostowi

Sposób działania

- kolateralna stabilizacja stawu kolanowego
- ochrona przed hiperekstensją i ograniczenie ruchu poprzez regulowany zawias physio- glide
- miękkka orteza z efektem kompresyjnym i proprioptycznym
- możliwość ograniczenia prostowania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

- możliwość ograniczenia zginania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- możliwość unieruchomienia pod kątem 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Instrukcja dotycząca zakładania

Rozpiąć wszystkie paski i zapięcia rzepowe. Wyciągnąć obydwie paski nieznacznie do tyłu, tak aby nie utrudniały zakładania ortozy.

Nogę ustawić w pozycji zgiętej pod kątem ok. 45°. Ortezę mocno owinąć wokół nogi i zapiąć obydwie paski z rzepami.

Zwrócić uwagę, aby rzepka kolana znajdowała się centrycznie w otworze rzepkowym ortozy.

Środki zginaczy ortozy powinny znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolana i nieznacznie z tyłu za boczną linią symetrii nogi.

zapiąć obydwie paski, najpierw dolny, a następnie górny.

Jeżeli to możliwe, przebiec parę metrów i ponownie sprawdzić prawidłowe osadzenie ortozy. W razie potrzeby skorygować osadzenie ortozy na nodze.

Skład produktu: Avional, Poliamid, Elastan, PU

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Niestabilność stawu kolanowego lekkiego lub średniego stopnia
- Uszkodzenia łąkotki
- Urazowe lub degeneracyjne zmiany w stawie kolanowym

Przeciwwskazania

- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach (np. w przypadku cukrzycy)
- Zaburzenia odpływu chłonki oraz nierozpoznane obrzęki tkanek miękkich, z dala od obszaru zastosowania

Rozmiar

obwód uda (cm)	31 - 37	37 - 45	45 - 51	51 - 57	57 - 65	65 - 74	74 - 84
rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
numer artykułu	G.070.041	G.070.042	G.070.043	G.070.044	G.070.045	G.070.046	G.070.047

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: szary