

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-przepuklinowe-damskie-pt0112-p-2706.html>



Majtki przepuklinowe damskie PT0112

| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | PT0112 |
| Producent | Pani Teresa |

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych lub udowych
- łagodzą ciągnące do pachwin bóle brzucha
- zabezpieczają uwypuklanie się worka przepuklinowego podczas wykonywania podstawowych czynności
- przydatne u pacjentek, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- profilaktycznie u chorych ze zwiotczającymi mięśniami brzucha i poszerzonymi kanałami pachwinowymi

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ płytka/pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

Tabela rozmiarów

| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Obwód pasa [cm] | 70 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 115 | 116 - 130 |
| Obwód bioder [cm] | 85 - 95 | 96 - 105 | 106 - 115 | 116 - 125 | 126 - 135 |

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa i bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Majtki założyć tak, aby płytki/peloty zabezpieczyły przepuklinę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć płytki/peloty. Po praniu ponownie umieścić je w tych samych miejscach.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL