

Link do produktu: <https://akmed.pl/miekki-stabilizator-nadgarstka-manumed-active-p-7821.html>



## Miękki stabilizator nadgarstka Manumed active

Numer katalogowy **9731**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Miękki stabilizator nadgarstka

- Anatomiczny kształt
- Nieuciskająca krawędź
- Łatwe zakładanie

### Szyna na dłoń stabilizuje i zmniejsza obciążenie na nadgarstek w przypadku stanów podrażnienia (pourazowych, pooperacyjnych i reumatycznych)

Manumed active jest stabilizatorem kompresyjnym nadgarstka. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne nadgarstka i tylko na nieuszkodzoną skórę.

#### Sposób działania

Dzięki połączeniu dzianiny uciskowej, paska i dopasowanej indywidualnie szyny Manumed active wywołuje efekt stabilizacji, zapobiegając niekorzystnym ruchom stawu nadgarstkowego. W ten sposób odciążone są mięśnie przedramienia oraz ścięgna i przyczepy ścięgien w nadgarstku. Ucisk dzianiny powoduje ponadto ograniczenie opuchlizny.

#### Instrukcja dotycząca zakładania

Przed założeniem opaski należy odpiąć pasek.

Proszę wyrwać na drugą stronę dolny koniec opaski. Należy teraz wsunąć szynę po wewnętrznej stronie opaski w przeznaczoną dla niej kieszeń.

Proszę zwrócić przy tym uwagę na właściwe ustawienie szyny względem kieszeni.

Proszę wciągnąć opaskę na dłoń. Litera „m” powinna być widoczna po grzbietowej stronie dłoni.

Proszę zapiąć pasek w ten sposób, aby otwór w pasku ustawiony był nad boczną kostką nadgarstka.

Aby zdjąć opaskę, należy rozpiąć pasek. Potem trzeba chwycić opaskę od strony wewnętrznej dłoni. Naciskając na znajdującą się po wewnętrznej stronie opaski kieszeń i szynę należy ściągnąć opaskę z dłoni.

---

**Skład produktu:** Poliamide, Pliester, Elastan

### Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

### Wskazania

- Bolesne zużycie stawu nadgarstkowego (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia i zapalenia stawu nadgarstkowego (np. Zapalenie stawów, reumatyzm, przeciążenie, stan pooperacyjny, itd.)
- Urazy stawu nadgarstkowego, np. zwichnięcia
- Zapalenie pochewki ścięgna
- Uczucie niestabilności stawu nadgarstkowego

### Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie)
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w przedramieniu i dłoni
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski
- Stosowanie łącznie z innymi produktami, np. z pończochami

obwód nadgarstka (cm)	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21
rozmiar	I	II	III	IV
numer artykułu	K.41◇.Δ01	K.41◇.Δ02	K.41◇.Δ03	K.41◇.Δ04

◇ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa / Δ = uzupełnić kolor: 2 = srebrny , 8 = piaskowy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV

**Kolor:** piaskowy , srebrny

**TYP:** lewy , prawy