

Link do produktu: <https://akmed.pl/miekki-stabilizator-uciskowy-locia-z-pelota-epicomed-p-7848.html>



Miękki stabilizator uciskowy łokcia z pelotą Epicomed®

Numer katalogowy **9758**

Producent **Medi**

Opis produktu

Miękki stabilizator uciskowy łokcia z pelotą

- Zintegrowana pelota silikonowa
- Bezuciskowa krawędź górna
- Indywidualna regulacja ucisku

Do leczenia przewlekłego pooperacyjnego i pourazowego stanu zapalnego

Epicomed jest opaską stawu łokciowego. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu łokciowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Uciskowa dzianina i wkładka silikonowa mają efekt masażu, co wspomaga proces gojenia
- Specjalne obszary ucisku zmniejszają ból i łagodzą nacisk przy wkładkach na ścięgnie

Sposób działania

Dzięki połączeniu dzianiny uciskowej i dwóch wkładek silikonowych Epicomed wywołuje efekt masażu, który poprawia ukrwienie, prowadząc tym samym do szybszej resorpcji obrzęków i krwiaków.

Łagodzi także podrażnienia i ból.

W zależności od obciążenia w trakcie pracy lub podczas uprawiania sportu pasek napinający może dodatkowo być indywidualnie ustawiany w ten sposób uniknąć można nadmiernego obciążenia mięśni i ścięgien.

Instrukcja dotycząca zakładania

Opaskę należy naciągnąć na łokieć do takiej wysokości, żeby wewnętrzna strona stawu łokciowego znajdowała się pośrodku wszytej w opaskę strefy komfortu, a szew biegł przez środek tylnego nadkłykcia. Opaska założona jest prawidłowo, jeżeli przez otwory w silikonowych wkładkach można dokładnie wyczuć dotykiem wewnętrzny i zewnętrzny nadkłykcieć (epicondylem).

Pasek napinający umożliwia indywidualną regulację ucisku (poluznienie lub zacieśnienie) w zależności od intensywności ruchu. W razie potrzeby pasek należy lekko poluzować również w trakcie noszenia.

Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Skład produktu: Polyamide, Polyester, Elastane

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

Nie wybielać.

Suszyć na powietrzu.

Nie prasować.

Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Podrażnienia przyczep ścięgien (Epicondylitis humeri), np. łokieć tenisisty
- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) wiążące się z obrzękami i krwiakami

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy
- Zaburzenia odpływu limfy - również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Rozmiar

obwód (cm)	17 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 35
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.400.Δ01	K.400.Δ02	K.400.Δ03	K.400.Δ04	K.400.Δ05	K.400.Δ06

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI

Kolor: czarny , piaskowy , srebrny