

Link do produktu: <https://akmed.pl/neurotemblak-rozmiar-universalny-pt0215-p-2732.html>



Neurotemblak - rozmiar uniwersalny PT0215

| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | PT0215 |
| Producent | Pani Teresa |

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- Neurotemblak przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku niedowładu lub porażenia

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

- Rozmiar standardowy.
- Dopasowanie indywidualne możliwe dzięki regulacji.

Sposób zakładania:

Kończynę górną umieszcza się w kieszeni temblaka, taśmy nośne krzyżuje się z tyłu na plecach, a następnie zapina z przodu na rzep. Regulacja taśm nośnych umożliwi indywidualne dopasowanie. Neurotemblak nosi się z pasem stabilizującym lub bez.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: bordowy , granatowy