

Link do produktu: <https://akmed.pl/odciagacz-easycomfort-sanity-p-7165.html>



## Odciągacz EASYCOMFORT SANITY


Numer katalogowy	<b>7062</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Odciągacz Easycomfort jest najbardziej zaawansowanym wyrobem tego typu w naszej ofercie.

Manualna obsługa gwarantuje wysokie bezpieczeństwo, oraz możliwość swobodnej kontroli tempa pracy aparatu. Wysokiej jakości odciągacz posiada dopasowaną i komfortową tarczę do nałożenia na piersь.

### Budowa:

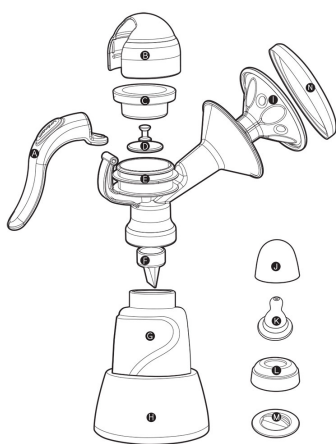

- A. Uchwyt (dźwignia)
- B. Osłonka membrany
- C. Membrana silikonowa
- D. Trzon
- E. Tarcza
- F. Zaworek
- G. Butelka
- H. Podstawka na butelkę
- I. Sylikonowa nakładka masująca
- J. Przykrywka na butelkę
- K. Smoczek
- L. Nakładka
- M. Dysk
- N. Osłonka na nakładkę silikonową.

### Bezpieczeństwo:

Jest to produkt do stosowania indywidualnego (prze jedną osobę). Użycie przez więcej niż jedną osobę może spowodować problemy zdrowotne oraz pojawić mogą się wątpliwości co do skuteczności działania.

---

**OSTRZEŻENIE:**

Nie nadużywaj ani nie modyfikuj urządzenia.  
Nie używaj smoczka od butelki jako smoczka uspokajacza.  
Przechowuj poza zasięgiem dzieci.  
Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem dorosłych  
5 Zawsze stosuj oryginalne części.

**Czyszczenie i dezynfekcja:**

1. Umyj dokładnie wszystkie części płynem do mycia i wypłucz.
2. Zdezynfekuj części zgodnie z instrukcją producenta sterylizatora.
3. Osusz wszystkie części przed ponownym złożeniem.

**UWAGA - PRODUKTY MOGĄ ULEC ZNISZCZENIU LUB ZNIEKSZTAŁCENIU JEŚLI BĘDĄ PODDANE WYSOKIEJ TEMPERATURZE (100°C) PRZEZ DŁUŻEJ IŻ 2 MINUTY.**

**Przewodnik użytkowania:**

1. Umyj ręce przed użyciem oraz przemyj pierś.
2. Upewnij się, że odpowiednie części są zdezynfekowane.
3. Zrelaksuj się i stymuluj twój odruch odptywu pokarmu.
4. Umieść tarczę odciągacza na piersi,
5. Delikatnie i powoli masuj pierś aż do momentu pojawienia się pokarmu.
6. Delikatnie odciągaj pokarm naciskając dźwignię odciągacza na tyle na ile jest to komfortowe.

**JAK PRZECHOWYWAĆ POKARM**

Najlepiej jeśli możesz od razu podać pokarm dziecku, jeśli nie to wskazane będzie przechowanie pokarmu.

- Temperatura pokojowa do 3 godzin
- Chłodziarka do 1 dnia
- Zamrażarka do 3 miesięcy

**NIE PRZETRZYMUJ POKARMU W GORĄCEJ WODZIE.**

**UWAGA:** Schładzaj pokarm w lodówce przez 2 godziny zanim zamrozisz.

**OSTRZEŻENIE:** Opisz pokarm przechowywany w lodówce wg daty i godziny odciągnięcia. Nie mieszaj pokarmu przechowywanego w lodówce z zamrożonym.

**JAK ROZMRAŻAĆ**

1. Umieść zamrożony pokarm w lodówce na kilka godzin przed użyciem.
2. Przed karmieniem umieść pokarm w gorącej wodzie do momentu gdy osiągnie temperaturę pokojową.
3. Potrząśnij butelką ponieważ mleko tłuste może się oddzielić od chudego.

**OSTRZEŻENIE:** Nie rozmrażaj pokarmu w kuchence mikrofalowej. Nie zamrażaj ponownie rozmrożonego mleka.