

Link do produktu: <https://akmed.pl/odciagacz-pokarmu-komfort-sanity-p-7166.html>



Odciągacz pokarmu KOMFORT SANITY

Numer katalogowy	7063
Producent	Sanity

Opis produktu

Odciągacz Pokarmu Comfort to propozycja dla wszystkich karmiących mam, które chcą pobrać niewykorzystany przez dziecko pokarm z piersi. Skuteczny odciągacz jest prosty w obsłudze, dopasowany, oraz dysponuje odpowiednią siłą ssącą.

Wysokiej klasy odciągacz Comfort pobierając pokarm zmniejsza ryzyko zatykania kanałków mlecznych a tym samym bolesnych infekcji.

Należy zadbać, aby całkowicie opróżniać pierś z niewykorzystanego pokarmu. Zapobiega to zatkaniam kanałków mlecznych, co jest najczęstszą przyczyną infekcji i zapaleń piersi w okresie laktacji. Odciągacz może być używany również przez kobiety mające podrażnione brodawki.

Odciągacz składa się z pompki ssącej i szklanej przystawki, doskonale dopasowuje się do piersi.

Sposób użycia i przechowywania:

Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem należy wymyć wszystkie części oddzielnie, wewnątrz oraz na zewnątrz a następnie gotować krótko w dużej ilości wody. Zwróć uwagę na to, aby wszystkie zanurzone części mogły swobodnie pływać w gotującej się wodzie. Unikaj dotykania wnętrza poszczególnych elementów. Umyj ręce i przemyj pierś. Umieść szklany zbiorniczek przy piersi, tak aby zbiornik na pokarm skierowany był ku dołowi. Naciśnij pompkę, a następnie stopniowo zwalnij ucisk. Zassany pokarm będzie się zbierał w zbiorniku odciągacza. Odciągacz przechowuj w suchym, zamkniętym pojemniku.

Bezpieczeństwo:

- Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie stosować środków dezynfekujących.
- W razie ewentualnego uszkodzenia jednej części, zniszczyć oraz wyrzucić cały zestaw.
- Przechowywać w suchym i zamkniętym pojemniku, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.