

Link do produktu: <https://akmed.pl/odciagacz-stymulator-laktacji-sanity-p-7167.html>



Odciągacz stymulator laktacji SANITY

Numer katalogowy	7064
Producent	Sanity

Opis produktu

Odciągacz Stymulator Laktacji działa na podobnej zasadzie jak dziecko ssące pokarm matki z piersi.

Nasz przyrząd wykorzystywany jest przez matki, które chcą opróżnić pierś z niewykorzystanego przez dziecko pokarmu. Wysokiej jakości odciągacz może być używany przez kobiety które cierpią z powodu podrażnionych brodawek.

Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem dokładnie wymyj oddzielnie wszystkie części produktu wewnątrz oraz na zewnątrz, a następnie włóż odciągacz do gotującej się wody na kilka minut.

Zwróć uwagę na to, aby wszystkie zanurzone części mogły swobodnie pływać w gotującej się wodzie. Unikaj dotykania wnętrza poszczególnych elementów. Przed użyciem umyj ręce i przemyj pierś. Umieść plastikową przystawkę przy piersi, tak aby zbiornik na pokarm skierowany był ku dołowi. Naciśnij pompkę a następnie stopniowo zwalniaj ucisk. Zassany pokarm będzie się zbierał w zbiorniku odciągacza.

Zalecenia:

- Produkt nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie należy stosować środków dezynfekujących.
- W razie ewentualnego uszkodzenia jednej z części, należy wyrzucić cały zestaw.
- Przechowywać w suchym i zamkniętym pojemniku, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- **WAŻNE:** Odciągacz pokarmu Sanity® jest przedmiotem wyłącznie indywidualnego użytku. Nie podawaj odciągniętego mleka dziecku, jeśli pokarm zetknął się z pompką.