

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-na-udo-pt0310-p-2669.html>



Opaska elastyczna na udo PT0310

Numer katalogowy	PT0310
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- chroni udo
- zapobiega obrzękom, zmniejsza opuchliznę
- po urazach mięśni uda
- przy przemęczeniu i nadwężeniu mięśni uda
- łagodzi bóle

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód na środku uda [cm]	38 - 47	48 - 54	55 - 63	64 - 69	> 69

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi na środku uda, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość uda.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL