

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-kolanowego-bezszwowa-pt0307-p-2666.html>



Opaska elastyczna stawu kolanowego, bezszwowa PT0307

Numer katalogowy	PT0307
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach
- wzmacnianie i ochrona stawów
- po zdjęciu opatrunków gipsowych
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 63

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.

Dostępne kolory:

cielisty PT 0307C

czarny PT 0307CZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL