

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-kolanowego-pt0301-p-2660.html>



## Opaska elastyczna stawu kolanowego PT0301

Numer katalogowy	<b>PT0301</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### Wskazania / Zastosowanie:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu kolanowego
- po zdjęciu opatrunków gipsowych - wzmacnia i stabilizuje kolano
- przed i po operacjach uszkodzonych łąkotec
- w przypadku zwichnięć lub obrażeń kolana
- zapobiega obrzękom, łagodzi ból
- wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 63	> 63

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL