

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-lokciowego-bezszwowa-pt0308-p-2667.html>



## Opaska elastyczna stawu łokciowego, bezszwowa PT0308

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>PT0308</b>      |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b> |

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach
- wzmacnianie i ochrona stawów
- po zdjęciu opatrunków gipsowych
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

#### Tabela rozmiarów

| ROZMIAR                     | S       | M       | L       | XL      |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Obwód ręki nad łokciem [cm] | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 35 | 36 – 40 |

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad łokciem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć na wysokość stawu łokciowego.

##### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

---

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.

**Dostępne kolory:**

cielisty PT 0308C

czarny PT 0308CZ

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**Kolor:** Cielisty , czarny