

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-lokciowego-pt0304-p-2663.html>



Opaska elastyczna stawu łokciowego PT0304

Numer katalogowy	PT0304
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Wskazania / Zastosowanie:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu łokciowego, łagodzi ból i obrzęki
- w zapaleniu kłykci kości ramiennej, a zwłaszcza po blokadach okołostawowych
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu łokciowego
- po stłuczeniach łokcia
- w przypadku wystąpienia krwiaka kaletki łokciowej
- po wszelkich operacjach stawu łokciowego
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód ręki nad łokciem [cm]	20 - 24	25 - 29	30 - 35	36 - 40	41 - 45

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki nad łokciem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Opaskę naciągnąć na wysokość stawu łokciowego.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL