

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-nadgarstkowego-krotka-bezszwowa-pt0309-p-2668.html>



Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego - krótka, bezszwowa PT0309

Numer katalogowy	PT0309
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach
- wzmacnianie i ochrona stawów
- po zdjęciu opatrunków gipsowych
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L
Obwód ręki w nadgarstku [cm]	14 - 18	19 - 22	23 - 25

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- W opakowaniu znajdują się dwie opaski.
- Opaski naciągnąć na wysokość stawów nadgarstkowych.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

Kolor: Cielisty , czarny