

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-skokowego-tasma-zapinana-na-rzep-pt0302-p-2661.html>



Opaska elastyczna stawu skokowego - taśma zapinana na rzep PT0302

Numer katalogowy	PT0302
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego
- w przypadkach schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych
- zabezpiecza po urazach
- chroni przed częstymi skręceniami stawu
- łagodzi bóle i obrzęki
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód nogi nad kostką [cm]	19 - 22	23 - 25	26 - 28	> 28

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Opaskę nałożyć na staw skokowy krzyżując taśmę na przegubie.

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL