

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-nadklykcia-medi-epibrace-p-7850.html>



Opaska nadkłykcia medi Epibrace

Numer katalogowy **9760**

Producent **Medi**

Opis produktu

Brace nadkłykcia

- Ruchoma, wypełniona powietrzem pelota
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Prawidłowy ucisk dzięki skali pomiarowej

Opaska przy zapaleniu nadkłykcia

medi Epibrace jest stabilizatorem nadkłykcia kości ramiennej. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne zaczerwienia mięśni i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Zmniejszenie obciążenia chorego mięśnia i przyczepów ścięgien w łokciu dzięki pelocie uciskowej

Instrukcja dotycząca zakładania

Proszę umocować pelotę zgodnie ze wskazaniem znajdującymi się na oznaczonej w tym celu ramce pozycjonującej. W przypadku Epicondylitis humeri radialis (łokcia tenisisty) na pozycji zewnętrznej, a w przypadku Epicondylitis humeri ulnaris (łokcia golfisty) na pozycji wewnętrznej. W przypadku prawego ramienia czubek peloty powinien być skierowany do góry, w przypadku lewego ramienia - na dół. Jeśli produkt jest poprawnie założony, czubek peloty powinien być zwrócony zawsze w kierunku dłoni.

Proszę ustawić największy możliwy obwód i zapiąć pas na ortezie.

Proszę założyć ortezę na uszkodzone przedramię, tak aby zapięcie skierowane było zawsze na zewnątrz.

Aby znaleźć właściwą pozycję na przedramieniu, proszę w przypadku łokcia tenisisty wyciągnąć zaciśniętą w pięść dłoń ku górze, a w przypadku łokcia golfisty - w dół. Należy tak umiejscowić pelotę na napiętej muskulaturze (promieniowo = ramię - strona zewnętrzna, łokciowo = ramię - strona wewnętrzna), aby odstęp między krawędzią ortezy a stawem łokciowym wynosił około 5 cm.

Proszę położyć ramię na twardym podłożu i na zakończenie napiąć pas naciągając go do cyfry, która odpowiada obwodowi Państwa przedramienia, np.: do "6" w przypadku obwodu wynoszącego 29 cm. Orteza powinna mocno osiąść na ramieniu, aby

nie mogła się zsunąć lub odpiąć. Możliwe jest indywidualne dopasowanie ucisku dostosowane do osobistej wrażliwości. Produkt zasadniczo należy stosować za zaleceniem lekarza, a pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny np. przez technika ortopedycznego. Równoczesne używanie opaski wraz z innymi produktami należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie.

Wskazówki dotyczące noszenia

Przy dłuższych okresach odpoczynku (np. Przed snem) należy ściągnąć opaskę medi Epibrace.

Skład produktu: Poliamid, PU

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Zapalenie przyczepów mięśniowych w stawie łokciowym, np.: łokieć tenisisty (Epicondylitis humeri radialis) lub łokieć golfisty (~humeri ulnaris).

Przeciwwskazania

- Brak

Rozmiar

rozmiar
numer artykułu

uniwersalny
R.110.009