

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-biodra-medi-hip-one-p-7862.html>



Orteza biodra medi Hip one

Numer katalogowy **9772**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza biodra

- Regulowany obwód i wysokość
- Idealne dopasowanie
- Szybkie i łatwe zdejmowanie i wkładanie

Orteza funkcjonalna stawu biodrowego

medi Hip one jest funkcjonalną ortezą biodra. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortotyczne biodra i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Zmienne ustawienia w celu ustawiania kąta odwodzenie i przywodzenie,
- Bezpiecznie anatomicznie ukształtowana konstrukcja podpór części miednicowej i udowej
- Dopasowywany obwód i wysokość
- Komfortowe wyściełanie
- Perfekcyjne dopasowanie dzięki osobnym częściom miednicowym i udowym
- Łatwe i szybkie zakładanie i ściąganie

Sposób działania

Chroni przed zwichnięciem/podwichnięciem
Kontrolowana wczesna funkcjonalna rehabilitacja ruchowa
Ograniczenie wyprostu i zgięcia ustawione w krokach co 10^o do 120^o

Instrukcja dotycząca zakładania

Podczas zakładania ortezy pacjent powinien stać. Najpierw należy rozpiąć wszystkie pasy i ustawić staw w pożądanym

zakresie ruchu (por. również Ustawianie stawu)

Najpierw zapiąć pas miednicowy. By dopasować część biodrową do indywidualnego obwodu, można wykorzystać regulację za pomocą czterech zewnętrznych śrub (por. Regulacja pasa miednicowego) oraz pasa brzuszego.

Następnie ustawić powłokę udową. Należy przy tym zwrócić uwagę, by powłoka udowa opierała się na kłykciu przyśrodkowym kości udowej, a staw znajdował się na wysokości okolicy punktu skrętu biodra.

Zapiąć pasy powłoki udowej. Następnie ustawić zalecony przez lekarza kąt addukcji lub abdukcji (por. Ustawianie abdukcji i addukcji).

Na koniec należy upewnić się, czy wszystkie śruby zostały dokręcone. Czynność tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu.

Skład produktu: Rama jest wykonana z aluminium, pasy z weluru, a ich końce z poliestru. Wyściółka jest wykonana z pianki PU.

Instrukcja prania

Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- leczenie zachowawcze stawu biodrowego i przemieszczenie stawu biodrowego
- przemieszczenie urazowe stawu biodrowego
- złamanie panewki
- stany pooperacyjne
- przemieszczenie protezy stawu biodrowego
- wymiana protezy stawu biodrowego
- rekonstrukcja panewki
- resekcja głowy kości udowej
- osteotomia korekcyjna

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane.

Rozmiar

AA obwód bioder (cm)	70 - 90	90 - 110	110 - 135
rozmiar	S	M	L
numer artykułu	5.5F9.1○2	5.5F9.1○3	5.5F9.1○4

○ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

B

B obwód uda (cm)	38 - 50	50 - 62	62 - 76
rozmiar	S	M	L
numer artykułu	5.5F9.2○2	5.5F9.2○3	5.5F9.2○4

○ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Aby otrzymać kompletny produkt, należy podać dwa numery artykułu: A część biodrowa

B część udowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S
Kolor: biały , czarny
TYP: lewy , prawy