

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kciuka-rhizomed-p-7860.html>



Orteza kciuka Rhizomed®

Numer katalogowy **9770**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza kciuka

- Indywidualna regulacja dzięki konstrukcji aluminiowej
- Łatwe użycie dzięki systemowi wsuwania

Orteza ortopedyczna na staw siodełkowy kciuka

Rhizomed jest ortezą kciuka. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie stawu kciuka i tylko na nieuszkodzonej skórze.

Zalety produktu

- Stabilizacja stawu siodełkowego kciuka i stawu podstawnego kciuka
- Zmniejszenie bólu związanego z ruchem poprzez stabilizację stawów kciuka

Instrukcja dotycząca zakładania

Proszę odpiąć wszystkie zapięcia rzepowe i wsunąć dłoń w ortezę.

Proszę zapiąć najpierw zapięcie rzepowe na kciuku, następnie punkt nacisku na powierzchnię dłoni, potem zaciągnąć pasek na stawie nadgarstkowym i zapiąć go. Jeżeli pasek jest za długi, można zdjąć zapięcie rzepowe i skrócić pasek nożyczkami.

Uwaga: Nie należy zapinać zapięcia rzepowego na kciuku zbyt mocno. Jeżeli odczuwają Państwo ból uciskowy, proszę wtedy poluzować zapięcie. W przypadku, gdy ból w dalszym ciągu występuje, należy zwrócić się do technika ortopedycznego lub lekarza.

Jeżeli odczuwają Państwo ból uciskowy na grzbiecie dłoni, można wtedy przyczepić do paska znajdującą się w komplecie wyściółkę (e).

W celu dodatkowego zabezpieczenia kciuka można wykorzystać znajdujący się w komplecie pasek. W tym celu należy nakleić rzep na szynę aluminiową poniżej zamocowania paska kciukowego. Następnie trzeba poprowadzić pasek wokół kciuka i zapiąć go.

Skład produktu: Aluminium, polyamide

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Urazy więzadeł pobocznych stawu śródreżnopaliczkowego kciuka (tzw. kciuk narciarza)
- Podrażnienia w okolicy stawu śródreżno-paliczkowego i stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka (np. zmiany zwyrodnieniowe stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka)
- Urazy torebki stawowej i/lub więzadeł pobocznych kciuka
- Pooperacyjne unieruchomienie kciuka

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane.

Rozmiar

nadgarstek do stawu kciuka (cm)	do 8	8 - 10	10 - 12	ab 12
rozmiar	XS	S	M	L
numer artykułu	R.140.01	R.140.02	R.140.03	R.140.04

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS

Kolor: czarny

TYP: lewy , prawy