

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-medi-rom-medi-rom-cool-z-ograniczeniem-zginania-prostowania-p-7884.html>



Orteza kolana medi ROM / medi ROM cool Z ograniczeniem zginania / prostowania

Numer katalogowy **9794**

Producent **Medi**

Opis produktu

Z ograniczeniem zginania / prostowania

- Pooperacyjne unieruchomienie dzięki zawiasowi „QuickSet”
- Przyjazna dla skóry pelota
- Łatwe użycie dzięki szybko zamykającemu paskowi

Uniwersalna szyna kolana z ograniczeniem zginania/prostowania i możliwościami unieruchomienia

medi ROM to uniwersalna szyna na kolano. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu kolanowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Korzyści produktu

- nowy, opatentowany zawias „QuickSet” – szybka i prosta obsługa.
- szerokie pasy z praktycznymi szybkimi zapięciami.
- możliwość rozsunęcia metalowych szyn.
- dopasowywane obicie z przyjaznego dla skóry materiału spodniego.
- również dostępna w „lekkiej” formie medi ROM cool.
- medi ROM i medi ROM cool dostępne w wersji krótkiej i długiej.

Sposób działania

- kolateralna stabilizacja stawu kolanowego
- pooperacyjne unieruchomienie
- kontrolowana mobilizacja
- zginanie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- prostowanie: 0°, 10°, 20°, 30°
- unieruchomienie pod kątem: 0°, 10°, 20°, 30°

Instrukcja dotycząca zakładania

Należy rozpiąć wszystkie paski i zdjąć szyny stawowe z wyściółki.

Następnie należy owinać mocno nogę wyściółką przeznaczoną dla uda i podudzia, po czym zapiąć ją na przedniej stronie. W pierwszej kolejności należy umocować boczną (zewnątrzną) szynę na wyściółce. Ważne jest przy tym, aby przegub szyny ustawiony był na rzepce i wzdłuż linii symetrii kolana.

Następnie w ten sam sposób należy umocować przyśrodkową (wewnętrzną) szynę. Należy się przy tym upewnić, czy oboje przeguby znajdują się na tej samej wysokości. Najpierw należy zapiąć górny pasek podudzia, a następnie dolny pasek podudzia. Na koniec zapiąć od dołu do góry pozostałe paski.

Aby zdjąć ortezę należy jedynie rozpiąć paski i wyściółkę, po czym ściągnąć ją przesuwając do tyłu.

Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ograniczników fleksyjnych i ekstensyjnych możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

Skład produktu: Aluminium, Pianka PU, Bawełna

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- pooperacyjnie po chirurgii stawu kolanowego
- do unieruchomienia po urazach kolana i do późniejszej mobilizacji
- dla pewnej stabilizacji uszkodzonych i zoperowanych więzadeł pobocznych

Przeciwwskazania

- Zakrzepica żył głębokich nogi i uda

Rozmiar

długość (cm)	57	63
rozmiar	krótki	długi
numer artykułu medi ROM	G.180.029	G.180.021
numer artykułu medi ROM cool	G.180.039	G.180.049

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: szary

Model: medi ROM , medi ROM cool

Długość: długi , krótki