

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kolana-z-ograniczeniem-prostowania-zginania-collamed-long-p-7871.html>



Orteza kolana z ograniczeniem prostowania / zginania Collamed® long

Numer katalogowy **9781**

Producent **Medi**

Opis produktu

Z ograniczeniem prostowania/zginania

- Bezpieczne dopasowanie dzięki zawiasowi Physioglide
- Działanie proprioceptywne dzięki precyzyjnej kompresji
- Duży komfort dzięki medi Airtex+
-

Długa, funkcjonalna orteza miękka z ograniczeniem zginania/prostowania

Collamed jest miękką ortezą stawu kolanowego z ogranicznikiem prostowania i zginania. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu kolanowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Optymalna stabilizacja dzięki 4-punktowej zasadzie
- Bezpieczna oboczna stabilizacja dzięki twardej ramie
- Ograniczenie prostowania i zginania chroni przed szkodliwymi ruchami stawu i odciąża uszkodzone struktury
- Poprawa propriocepcji w celu poprawy samodzielnego prowadzenia i stabilizacji stawu kolanowego
- Zapobieganie przeprostowi

Sposób działania

- dobra stabilizacja dzięki 4-punktowemu systemowi
- ochrona przed hiperekstensją i ograniczenie ruchu poprzez regulowany zawias physioglide
- kolateralna stabilizacja stawu kolanowego poprzez długie szyny
- miękka orteza z efektem kompresyjnym i proprioceptycznym
- możliwość ograniczenia prostowania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

- możliwość ograniczenia zginania do 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- możliwość unieruchomienia pod kątem 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- możliwość noszenia na prawej lub lewej

Instrukcja dotycząca zakładania

Rozpiąć wszystkie paski i obydwa paski z rzepami. Obydwie dołączone plastikowe płytki włożyć między pas a prowadnicę pasa. Wyciągnąć górne paski nieznacznie do tyłu, tak aby nie utrudniały zakładania ortezy.

Nogę ustawić w pozycji zgiętej pod kątem ok. 45°. Ortezę mocno owinąć wokół nogi i zapiąć obydwa paski z rzepami. Zwrócić uwagę, aby rzepka kolana znajdowała się w pozycji centralnej w wyżłobieniu na rzepkę. Środki zginaczy ortezy powinny znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolana i nieznacznie z tyłu za boczną linią symetrii nogi.

Zapiąć najpierw przedni dolny pasek podudzia (Rysunek 4), a następnie tylny dolny pasek.

Następnie zapiąć górny pasek udowy i wyjąć plastikowe płytki. Potem zapiąć przedni pasek bezpośrednio pod rzepką kolana i odpowiadający mu tylny pasek.

Na koniec zapiąć dolny pasek udowy i również stąd wyjąć plastikowe płytki.

Jeżeli to możliwe, przebiec parę metrów i ponownie sprawdzić prawidłowe osadzenie ortezy. W razie potrzeby skorygować osadzenie ortezy na nodze.

Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ograniczników flekcyjnych i ekstensyjnych możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

Aby uniknąć nadmiernego wydłużenia ortezy muszą być zawsze założone kliny ekstensyjne lub kliny o kącie 0°. Kliny określają w dokładny sposób promień dopuszczalnego zakresu ruchu ortezy.

W przypadku dolegliwości tkanki miękkiej w wyniku jej ściśnięcia koniecznym może się okazać zastosowanie większego ogranicznika, tak aby ograniczyć promień ruchu kolana do pożądanej wartości.

Należy również pamiętać, aby przeguby ortezy znajdowały się we właściwej pozycji: środek przegubów powinien znajdować się na wysokości górnej krawędzi rzepki kolanowej. Przegub powinien być usytuowany za boczną linią symetrii nogi.

Skład produktu: Avional, Poliamid, Elastan, Polister

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep i wyjęciu szyny z przegubem. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Leczenie zachowawcze więzadeł pobocznych
- Lekkie niestabilności więzadła krzyżowego
- Ograniczenie ruchu po zeszczeniu łąkotki
- Zabiegi rekonstrukcyjne po zwknięciu rzepki
- Chroniczne niestabilności
- Pourazowe lub zwyrodnieniowe zmiany stawu kolanowego

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nieznanne.

Rozmiar

obwód uda (cm)	31 – 37	37 – 45	45 – 51	51 – 57	57 – 65	65 – 74
rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL

numer artykułu G.060.151 G.060.152 G.060.153 G.060.154 G.060.155 G.060.156

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

Kolor: szary