

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-ledzwiowa-do-mobilizacji-lumbamed-disc-p-7827.html>

## Orteza lędźwiowa do mobilizacji Lumbamed® disc



Numer katalogowy	<b>9737</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Medi</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### Orteza lędźwiowa do mobilizacji

- Stabilność można dostosowywać/zmniejszać dzięki budowie modułowej
- Idealne dopasowanie dzięki anatomicznie ukształtowanemu zapięciu

### Stabilizator lędźwiowy z regulowanym systemem stabilizacyjnym do leczenia protruzji lub wypadnięcia krążka międzykręgowego

Lumbamed disc to orteza lędźwiowa do mobilizacji. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu dolnej części kręgosłupa. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

#### Zalety produktu

- Stabilizacja odcinka lędźwiowego i połączenia lędźwiowo-krzyżowego za pomocą zintegrowanych grzbietowych elementów stabilizujących
- Zmniejszenie lordozy odcinka lędźwiowego za pomocą kompresji brzucha, system pasków zapewnia dodatkowe wsparcie obszaru brzucha
- Dzięki budowie modułowej (pelota na plecach, paski i wymienne fiszbiny stabilizujące) można dostosowywać/zmniejszać stabilność w celu dopasowania do przebiegu regeneracji

#### Sposób działania

Poprzez połączenie uciskowej tkaniny, umieszczonych wewnątrz prętów i zewnętrznego systemu pasa podporowego Lumbamed disc działa stabilizująco na obszar dolnej partii kręgosłupa, odcinek piersiowy i lędźwiowy oraz w części przejścia do miednicy, nie wpływając przy tym negatywnie na siłę mięśni. Poprawia się statyka kręgosłupa i dochodzi do odciążenia tych segmentów kręgosłupa oraz, co za tym idzie, do złagodzenia bólu. Zmienne elementy podporowe umożliwiają szybkie przywrócenie mobilności. Poprzez zdjęcie systemu pasa podporowego można dostosować stabilność ortezy do procesu leczenia. Ponadto można wymienić umieszczone wewnątrz pręty na bardziej miękkie. Pozwala to na stopniowe aktywizowanie mięśni tułowia. Wytyczne w zakresie odpowiednich etapów terapii określa lekarz prowadzący.

## Instrukcja dotycząca zakładania

Przed założeniem ortezy należy rozpiąć pasy, by podczas zakładania uniknąć ciągnięcia. W tym celu należy rozpiąć znajdujące się końcach pasów rzepy i przesunąć je w tył na welurową część pasów.

Etykieta na wewnętrznej stronie zapięcia po prawej stronie pomaga zorientować się, w jaki sposób należy założyć ortezę (różową krawędzią do góry).

Najpierw lewą dłoń wsunąć do wewnętrznego uchwytu lewej części zapięcia.

Przełożyć ortezę wokół tułowia i, kontrolując położenie etykiety, jeszcze raz sprawdzić, czy znajduje się ona we właściwej pozycji (różową krawędzią do góry).

Następnie prawą dłoń wsunąć do zewnętrznego uchwytu po prawej stronie zapięcia.

Obie krawędzie zapięcia ściągnąć po środku w taki sposób, by rzepy sięgały możliwie równo i głęboko. Przy zapinaniu należy zwrócić uwagę, by gorset znajdował się symetrycznie. Orteza jest założona właściwie, jeśli dolna krawędź zapięcia znajduje się w niewielkim odstępnie nad kością łonową.

Rozpiąć końcówki rzepów dolnych napinanych pasów, ciągnąc je jednocześnie w przód. Stopień opinania można samodzielnie regulować w zależności od potrzeb i nasilenia dolegliwości.

Wskazówka dla technika: Długość pasów można dopasować, przycinając je u podstawy rzepu Y

**Skład produktu:** Poliamid, Poliester, Elastan, Tworzywo sztuczne ABS

## Instrukcja prania

Przed praniem usunąć umieszczone wewnątrz pręty (por. rys. 12) oraz system pasa podporowego, zdejmując go z elementu łączeniowego w kształcie litery Y. Podczas składania zwrócić uwagę na to, aby logo firmy medi na płaskownikach grzbietowych znajdowały się na górze. Paski z rzepami należy przed praniem zapiąć. Płyny zmiękczające do płukania, tłuszcze, oleje, mleczka i maści mogą uszkodzić materiał i zniwelować efekt Clima Comfort. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał. Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

## Wskazania

- Przepuklina lub wypuklina krążka międzykręgowego (również pooperacyjnie)
- Nawracające blokady w dolnej części pleców
- Bóle spowodowane ścieraniem tkanek (np. zwyrodnieniowe zmiany małych stawów kręgowych)
- Brak równowagi aparatu mięśniowego brzucha i grzbietu

## Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie)

## Rozmiar

Damski

obwód bioder (cm)	76 - 86	86 - 98	98 - 111	111 - 125	125 - 140	140 - 156
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.220.341	K.220.342	K.220.343	K.220.344	K.220.345	K.220.346

Męski

---

obwód pasa cm	66 - 76	76 - 88	88 - 101	101 - 115	115 - 130	130 - 146
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI
numer artykułu	K.220.331	K.220.332	K.220.333	K.220.334	K.220.335	K.220.336

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** I , II , III , IV , V , VI

**Kolor:** srebrny

**TYP:** Damski , Męski