

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-lokcia-medi-epico-roms-p-7851.html>



Orteza łokcia medi Epico ROM®s

Numer katalogowy **9761**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza łokcia

- Regulowane ograniczenie zginania/prostowania
- Poprawa odpływu krwi i chłonki
- Mała waga

Ortezy łokcia do mobilizacji z unieruchomieniem stawu promieniowo-łokciowego bliższego

medi Epico ROMs jest ortezą stawu łokciowego. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne stawu łokciowego i tylko na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Unieruchomienie stawu łokciowego poprzez unieruchomienie górnej części ramienia i przedramienia
- Ruchomość stawu jest ograniczona do 0°-120° w celu zapewnienia zakresu ruchomości właściwego dla etapu rehabilitacji
- Zapobieganie ruchom, które mogą spowodować zwichnięcie lub podwichnięcie
- Zapobieganie ruchom pronacyjnym i supinacyjnym dzięki podpórce dłoni

Instrukcja dotycząca zakładania

Należy odpiąć wszystkie paski z rzepami i założyć ortezę w taki sposób, aby przegub znajdował się bezpośrednio nad boczną częścią nadkłykcia. Długość podpórki na rękę można regulować przy pomocy obu śrub znajdujących się na szynie przedramiennej.

Najpierw zapiąć pasy przedramienia a następnie pasy ramion

Koniec paska, który ma przechodzić za karkiem, należy przelożyć przez otwór w mankiecie naramiennym i zapiąć zapięcie Velcro.

Drugi koniec założyć na bark i przelożyć przez otwór w podpórka na rękę, a następnie zapiąć na rzep.

Poduszka, która będzie chronić kark, daje się dowolnie przesuwac, ale powinna znajdować się w pozycji wyśrodkowanej nad

barkami. W razie poduszki można przyciąć nożyczkami.

Rama ortezy jest wykonana z aluminium i w razie potrzeby można ją wyprofilować. Należy jednak unikać dopasowywania w bezpośrednim obszarze stawu.

Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ograniczników fleksyjnych i ekstensyjnych możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego. W pierwszych dniach po urazie paski należy często poluzowywać, aby uniknąć silnego obrzęku.

Skład produktu: Aluminium, Pianki PU, Bawełna

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania wyściółki i pokrycia najlepiej używać środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Przy normalnym użytkowaniu mechanizm przegubowy jest bezobsługowy, jednak można go spryskać olejem teflonowym.

Wskazania

- Leczenie zachowawcze zwichnięć stawu łokciowego z i bez urazów towarzyszących
- Konieczność zastosowania ortezy w przyśrodkowych lub bocznych złamaniach nadkłykcia
- Leczenie pooperacyjne po wszczepieniu protezy
- Wczesnoczynnościowe leczenie uzupełniające przy stabilnych złamaniach dalszego odcinka kości ramiennej
- Tymczasowe unieruchomienie po artrolizie łokcia
- Jako statyczna szyna stabilizująca palce dłoni

Przeciwwskazania

- Ze względu na zbyt mocne zapinanie pasów może dojść do zastoju limfy.
- Z tego względu paski należy często otwierać.

Rozmiar

długość (cm)

rozmiar

numer artykułu

do 29 29 - 42

S L

R.032.◇02 R.032.◇04

◇ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , S

TYP: lewy , prawy