

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-dlon-i-przedramie-korygujaca-zniekształcenie-reki-pt0330-p-2659.html>



Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki PT0330

Numer katalogowy	PT0330
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zwichnięcia stawu nadgarstkowego i kciuka, uszkodzenia i zapalenia ścięgien
- zespoły bólowe nadgarstka i kciuka, ostre lub przewlekłe zapalenia kości nadgarstka
- stosowanie po zabiegach operacyjnych (ortopedia, traumatologia)
- schorzenia neurologiczne pochodzenia centralnego lub obwodowego
- zniekształcenia i niestabilność stawów nadgarstka lub kciuka (reumatologia)
- doleczenie złamań kości przedramienia i nadgarstka

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L
Obwód ręki w nadgarstku [cm]	14 - 16	17 - 21	22 - 25

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Ortezę wciągnąć na staw nadgarstkowy, umieszczając kciuk w otworze. Następnie należy zapiąć 2 taśmy dociągające i taśmę na śródreżcu dopasowując ortezę, a następnie ustabilizować kciuk, zapinając taśmę dociągającą wokół kciuka. Nadmiar taśmy stabilizującej kciuk można ostrożnie odciąć nożyczkami tak, by nie uszkodzić wyrobu.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Przed praniem wymontować wkładki aluminiowe i szynę oraz zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

Po praniu, uprzednio wyjęte elementy, umieścić ponownie w tych samych miejscach.

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S

TYP: lewy , prawy