

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-kolano-z-pierścieniem-silikonowym-na-rzepke-i-z-dodatkowymi-pasami-genumedi-plus-p-7866.html>



Orteza na kolano z pierścieniem silikonowym na rzepkę i z dodatkowymi pasami Genumedi® plus

Numer katalogowy **9776**

Producent **Medi**

Opis produktu

Orteza na kolano z pierścieniem silikonowym na rzepkę i z dodatkowymi pasami

- Maksymalne odciążenie
- System antypoślizgowy
- Produkt dostępny również w wersji na miarę

Stabilizator kolana z pierścieniem silikonowym na rzepkę i dodatkowymi paskami

Genumedi plus to orteza na kolano z pierścieniem silikonowym i paski.

Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu kolanowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę do prawidłowego opatrywania ran.

Zalety produktu

- Z dodatkowymi paskami do stabilizacji i poprawy komfortu noszenia
- Maksymalne odciążenie rzepki dzięki specjalnemu wewnętrznemu brzegowi na pierścień silikonowy
- System antypoślizgowy z silikonem przebiegającym przyśrodkowo i bocznie
- Produkt dostępny również w wersji na miarę

Sposób działania

Wbudowana specjalna wkładka silikonowa Genumedi odciąża rzepkę i w połączeniu z uciskiem wywieranym przez materiał powoduje efekt masażu, co z kolei poprawia ukrwienie stawu i przyspiesza gojenie obrzęków i wysięków śródstawowych, a także łagodzi podrażnienia i bóle.

Jednocześnie poprawia się motoryka mięśni oraz zdolność samodzielnej stabilizacji stawu kolanowego. Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej.

Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień.

Należy się również kierować własnym odczuciem, a także uwzględnić fakt, iż w pozycji siedzącej kolano nie może być zginane powyżej 70°.

Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę. W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu. Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać.

Instrukcja dotycząca zakładania

Poluźnij oba paski

Przytrzymaj opaskę za górny koniec bocznych pasków z wypustkami w taki sposób, aby kciuk znajdował się od wewnątrz. Naciągnij opaskę na kolano tak, aby silikonowy pierścień w sposób wyśrodkowany otaczał rzepkę oraz nie uciskał jej.

Następnie zapnij paski.

Aby zdjąć opaskę należy ją przytrzymać za dolne boczne usztywniacze i ściągnąć w dół.

Wskazówki dotyczące noszenia

Pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny.

Wbudowana specjalna wkładka silikonowa Genumedi odciąża rzepkę i w połączeniu z uciskiem wywieranym przez materiał powoduje efekt masażu, co z kolei poprawia ukrwienie stawu i przyspiesza gojenie obrzęków i wysięków śródstawowych, a także łagodzi podrażnienia i bóle. Jednocześnie poprawia się motoryka mięśni oraz zdolność samodzielnej stabilizacji stawu kolanowego. Maksymalną skuteczność opaski osiągają podczas aktywności fizycznej. Z zasady możliwe jest noszenie opaski przez cały dzień.

Należy się również kierować własnym odczuciem, a także uwzględnić fakt, iż w pozycji siedzącej kolano nie może być zginane powyżej 70°.

Przy przedłużającym się stanie spoczynku stawu (np. długie siedzenie/prowadzenie pojazdu, sen) należy zdejmować opaskę. W przypadku wystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia podczas noszenia opaski, proszę ją natychmiast zdjąć i udać się do swojego lekarza lub specjalistycznego sklepu.

Bandaż nadaje się do stosowania w wodzie. Produkt należy dokładnie wypłukać.

Skład produktu: Poliamide, Poliester, Elastan, Wiskoza

Instrukcja prania

Przed praniem nie trzeba wyjmować pierścienia silikonowego. Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzepkę. Płyny zmiękczające do płukania, tłuszcze, oleje i maści mogą uszkodzić materiał i zniwelować efekt Clima Comfort. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Stany zapalne stawu (zapalenie stawu)
- Bolesne zużycie stawu (choroba zwyrodnieniowa)
- Podrażnienia w obrębie stawu (np. przeciążenia, urazy, zabiegi) wiążące się z obrzękami i krwiakami
- Bóle w okolicy rzepki (zespół bólowy przedniego przedziału kolana)

Przeciwwskazania

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).
- Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy, żyłaków
- Zaburzenia odpływu limfy – również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski

Rozmiar

obwód "f" (cm)	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	49 - 52	52 - 55	55 - 58
obwód "d" (cm)	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46
rozmiar	I	II	III	IV	V	VI	VII

numer artykułu K.110.221 K.110.222 K.110.223 K.110.224 K.110.225 K.110.226 K.110.227

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: srebrny