



## Orteza na ramię i bark PT0232

Numer katalogowy	<b>PT0232</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### **WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:**

- ogranicza ruchomość i stabilizuje staw ramienny i barkowy
- podtrzymuje kończynę górną w przypadku niedowładu lub porażenia
- wspomaga rekonwalescencję po urazach kończyny górnej
- łagodzi bóle

#### **Instrukcja używania:**

##### **Dopasowanie rozmiaru:**

- Wyrób produkowany jest w rozmiarze uniwersalnym.
- Zapięcia na rzep umożliwiają indywidualne dopasowanie.

##### **Sposób zakładania:**

Odpiąć rzepy. Nałożyć ortezę, umieszczając kończynę górną w tunelu ortezy, taśmy skrzyżować z tyłu na plecach, a następnie zapiąć z przodu na rzep. Regulacja tych taśm umożliwi indywidualne dopasowanie. W dalszej kolejności zapiąć pas stabilizujący.

##### **Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

##### **Przepis prania:**

Przed praniem zapiąć rzepy w celu uniknięcia pohaczenia.

---

**Uwagi:**

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Wyrób zaپیty zbyt ciasno może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.